

Sikatriss, silikonowy plaster na blizny, 10 cm x 10 cm, 5 sztuk

Cena: 84,89 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	SIKATRIS
Opakowanie	5 sztuk
Postać	Plastry
Producent	BIOVENA HEALTH SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Ochronne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Sikatriss to silikonowy plaster na blizny, który wspomaga poprawę ich wyglądu. Produkt jest przeznaczony do stosowania na blizny powstałe w wyniku urazów, oparzeń oraz zabiegów chirurgicznych. Regularne używanie pomaga zmniejszyć ryzyko nieprawidłowego procesu bliznowacenia, wspierając regenerację skóry.

Wskazania

Plaster o wymiarach 10 cm x 10 cm jest polecany do wspomagania rehabilitacji blizn:

- pooperacyjnych, pozabiegowych;
- pourazowych;
- powstałych na skutek zrobienia/usunięcia tatuażu;
- pooparzeniowych.

Stosowanie

- Plaster może być stosowany przez 3-5 dni, a następnie zmieniany.
- Najlepsze rezultaty uzyskuje się zmieniając plaster co 24 h.
- Bliznę i skórę wokół blizny zaleca się przemywać raz dziennie przy użyciu łagodnego mydła.

Sposób użycia

- Przed zastosowaniem należy dokładnie umyć dłonie.
- Delikatnie umyć bliznę i skórę wokół niej przy użyciu mydła. Spłukać i delikatnie osuszyć.
- Wyjąć plaster z opakowania. W razie potrzeby można go przyciąć.
- Usunąć folię z plastra. Stronę samoprzylepną skierować do skóry, a następnie dokleić do całej powierzchni.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

Ostrzeżenia

- Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją użytkowania i etykietą bądź skonsultować się z lekarzem.
- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu. W razie wystąpienia niepokojących objawów lub działań niepożądanych należy przerwać stosowanie wyrobu i skontaktować się z lekarzem.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Chronić od światła i wilgoci.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
- Tylko do użytku zewnętrznego.

Producent

Biovena Health Sp. z o.o
Kolejowa 47
05-092 Łomianki
biuro@biovenahealth.com