

Silaurum, silikonowe plastry na blizny, 10 cm x 3 cm, 6 sztuk

Cena: 58,85 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	6 sztuk
Postać	Plastry
Producent	SOLINEA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Redukcja blizn, Regenerujące (odbudowujące), Rozjaśniające, Wygładzające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny, Akcesoria
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Silikonowe plastry **Silaurum** są przeznaczone do stosowania na świeże oraz istniejące blizny o różnym pochodzeniu. Te miękkie, samoprzylepne plastry pomagają rozjaśnić, wygładzić i zmniejszyć widoczność blizn.

Składniki

Żel silikonowy.

Zastosowanie

- Pielęgnacja blizn różnego pochodzenia, na przykład: pooperacyjnych, poparzeniowych, pourazowych.
- Wygładzenie i rozjaśnienie blizn nowo powstałych oraz istniejących.
- Wspomaganie prawidłowego bliznowacenia zmian skórnych.

Sposób użycia

- Przed nałożeniem plastra należy dokładnie oczyścić, a następnie osuszyć obszar blizny.
- Wyjąć plaster z opakowania ochronnego, a następnie delikatnie usuwając folię zabezpieczającą, przyłożyć plaster samoprzylepny stroną do blizny.
- Zdejmując ostrożnie resztę folii ochronnej, przykleić cały plaster na powierzchnię blizny.
- Należy unikać dotykania samoprzylepnej strony plastra przed nałożeniem.
- Należy zawsze stosować taką wielkość plastra, aby cała blizna była nim pokryta.
- Zaleca się wymianę plastra co 3-5 dni lub gdy przestaje już przywierać do skóry.
- Unikać moczenia miejsca z nałożonym plastrem, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo jego przedwczesnego odklejenia.
- W celach higienicznych zaleca się, aby raz dziennie zdjąć plaster, a następnie oczyścić i osuszyć skórę przed ponownym nałożeniem.
- W przypadku mniejszych blizn plaster można dociąć do uzyskania pożądanej wielkości. Plaster należy przycinać przed



oderwaniem folii ochronnej.

Przeciwwskazania

- Plastrów nie należy stosować na rany otwarte, oparzenia błony śluzowej ani na zmienioną zapalnie skórę.
- Nie stosować u osób uczulonych na silikon.
- Nie zaleca się jednoczesnego stosowania z innymi wyrobami lub lekami do leczenia blizn bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

Ważne wskazówki

- W przypadku wystąpienia reakcji skórnej (wysypka, swędzenie itp.) po zastosowaniu plastra należy przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej, chronić od światła.
- Nie stosować po upływie terminu ważności.

Producent

Solinea Sp. z o.o. Sp. K.
Elizówka 65, Hala I
21-003 Ciecierzyn