

Silaurum, silikonowe plastry na blizny, 5 cm x 30 cm, 5 sztuk

Cena: 117,69 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	5 sztuk
Postać	Plastry
Producent	SOLINEA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Redukcja blizn, Regenerujące (odbudowujące), Rozjaśniające, Wygładzające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny, Akcesoria
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Silaurum plastry to miękkie, samoprzylepne plastry silikonowe do stosowania na blizny różnego pochodzenia, zarówno świeże, jak i już istniejące. Plastry pomagają rozjaśniać, wygładzać i zmniejszać widoczność blizn.

Składniki

Żel silikonowy.

Zastosowanie

- Pielęgnacja blizn różnego pochodzenia, na przykład: pooperacyjnych, poparzeniowych, pourazowych.
- Wygładzenie i rozjaśnienie blizn nowo powstałych oraz istniejących.
- Wspomaganie prawidłowego bliznowacenia zmian skórnych.

Sposób użycia

- Przed nałożeniem plastra należy dokładnie oczyścić, a następnie osuszyć obszar blizny.
- Wyjąć plaster z opakowania ochronnego, a następnie delikatnie usuwając folię zabezpieczającą, przyłożyć plaster samoprzylepny stroną do blizny.
- Zdejmując ostrożnie resztę folii ochronnej, przykleić cały plaster na powierzchnię blizny.
- Należy unikać dotykania samoprzylepnej strony plastra przed nałożeniem.
- Należy zawsze stosować taką wielkość plastra, aby cała blizna była nim pokryta.
- Zaleca się wymianę plastra co 3-5 dni lub gdy przestaje już przywierać do skóry.
- Unikać moczenia miejsca z nałożonym plastrem, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo jego przedwczesnego odklejenia.
- W celach higienicznych zaleca się, aby raz dziennie zdjąć plaster, a następnie oczyścić i osuszyć skórę przed ponownym nałożeniem.
- W przypadku mniejszych blizn plaster można dociąć do uzyskania pożądanej wielkości. Plaster należy przycinać przed



oderwaniem folii ochronnej.

Przeciwwskazania

- Plastrów nie należy stosować na rany otwarte, oparzenia błony śluzowej ani na zmienioną zapalnie skórę.
- Nie stosować u osób uczulonych na silikon.
- Nie zaleca się jednoczesnego stosowania z innymi wyrobami lub lekami do leczenia blizn bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

Ważne wskazówki

- W przypadku wystąpienia reakcji skórnej (wysypka, swędzenie itp.) po zastosowaniu plastra należy przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej, chronić od światła.
- Nie stosować po upływie terminu ważności.

Producent

Solinea Sp. z o.o. Sp. K.
Elizówka 65, Hala I
21-003 Ciecierzyn