

SilMed Termometr bezręciowy CR.W00



Cena: 22,31 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	termometr
Producent	HELBO SP. Z O.O.
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Przeznaczony do pomiaru temperatury ciała u dzieci i dorosłych.

Sposób użycia

- Wyjmij termometr z opakowania/etui.
- Przed użyciem upewnij się, czy słupek cieczy metalicznej w kapilarze znajduje się poniżej 36stC na skali pomiarowej. Jeżeli nie, ciecz należy strząsnąć poniżej tej wartości.
- Umyj i zdezynfekuj termometr.
- Umieść termometr w miejscu pomiaru tak, ab końcówka pomiarowa bezpośrednio dotykała ciała. Czas pomiaru powinien wynosić około 5 minut.
- Odczytaj wynik ze skali pomiarowej.

Właściwości

- Przeznaczony do pomiaru temperatury ciała u dzieci i dorosłych.
- Bezpieczny i nietoksyczny – nie zawiera rtęci.
- Dokładność 0,1stC.
- Higieniczny – łatwa dezynfekcja.
- Czytelna skala i lupa ułatwiająca odczytywanie wyników pomiaru temperatury.
- Dwuczęściowe etui z końcówką ułatwiającą strząsanie.
- Przyjazny dla środowiska – nie wymaga baterii.
- Zakres pomiaru: 35-42stC.
- Metody pomiaru: pod pachą, w ustach, w odbycie.
- Czas pomiaru ok. 5 minut.

Producent



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

WUXI MEDICAL INSTRUMENT FACTORY CO., Ltd.
No. 43, Xixin Road, Zhangjing,
Xibei Town, Wuxi City, Jiangsu
214194, China