

SilMed Termometr elektroniczny DMT-4333, 1 sztuka

Cena: 16,65 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	termometr
Producent	HELBO SP. Z O.O.
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Przeznaczony do pomiaru temperatury ciała u dzieci i dorosłych.

Sposób użycia

- Włącz termometr przyciskiem on/off. Po sygnale dźwiękowym na ekranie wyświetli się wynik ostatnio zmierzonej temperatury, następnie wskazanie temperatury autotestu.
- Gotowość termometru sygnalizowana jest poprzez pojawienie się symbolu „Lo” wraz z migającym symbolem °C lub °F
- Umieść termometr w żądanym miejscu:

Jama ustna: umieść termometr pod językiem, zamknij usta i oddychaj spokojnie przez nos.

Pacha: wytrzymaj pachę, umieść końcówkę pomiarową termometru i trzymaj ramię mocno przyciśnięte do boku.

Odbyt: posmaruj końcówkę termometru wazeliną. Delikatnie włóż końcówkę pomiarową na głębokość 1 cm.

- Odczekaj do usłyszenia sygnału dźwiękowego.
- Aby uzyskać dokładniejsze wyniki pomiaru temperatury, zaleca się trzymanie termometru w jamie ustnej i odbycie przez około 2 minuty, a pod pachą przez około 5 minut bez względu na wydawany sygnał dźwiękowy.
- Krótsze i szybsze dźwięki wydawane przez termometr oznaczają alarm gorączki, który uruchamiany jest automatycznie, gdy badana temperatura przekracza 37,8°C (100°F).

Właściwości

SilMed Termometr elektroniczny DMT-4333:

- Posiada elastyczną końcówkę do pomiaru,
- Możliwość wyboru skali °C/°F,
- Automatyczne wyłączanie po 10 minutach bezczynności,
- Dokładność pomiaru: +/- 0,1°C dla zakresu 35,5°C - 42°C,



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

- Wodoodporny (IP 27),
- Alarm gorączki,
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii,
- Zakres pomiaru 32°C – 42,9°C,
- Miejsce pomiaru: jama ustna, pachy, odbyty,
- 2 letnia gwarancja DOOR TO DOOR

Dodatkowe informacje

Zawartość opakowania:

- Termometr – 1 sztuka
- Bateria 1,5V – 1 sztuka
- Etui plastikowe – 1 sztuka
- Instrukcja obsługi – 1 sztuka

Producent

JOYTECH HEALTHCARE CO., LTD.
No.365 Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone,
311100 Zhejiang, Hangzhou, China