

Simplitude ByMe, test wykrywający zarażenie wirusem HIV, 1 zestaw

Cena: 83,72 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	test
Producent	ZBADAJSIE SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Diagnostyczne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Simplitude ByMe Test HIV to szybki test medyczny w formie testu immunochromatograficznego, przeznaczony do samodzielnego stosowania w warunkach domowych. Umożliwia wykrycie przeciwciał dla wirusa HIV, w tym zarówno typu 1 (HIV-1), jak i typu 2 (HIV-2). Urządzenie zawiera wszystkie niezbędne elementy – nakłuwacz i pipetę – zintegrowane w jego obudowie. Wynik uzyskuje się już po 15 minutach, a skuteczność testu sięga 99,6%.

Działanie

Ludzki wirus niedoboru odporności (HIV) dzieli się na dwa typy: HIV-1 i HIV-2. Układ immunologiczny osoby zarażonej wirusem wytwarza przeciwciała skierowane przeciwko jednemu, drugiemu lub obydwu jego typom. Test Simplitude ByMe potrafi wykryć te przeciwciała, niezależnie od typu wirusa. W sytuacji uzyskania wyniku pozytywnego, konieczne należy go potwierdzić u lekarza.

Sposób użycia

- Przed przystąpieniem do testu dokładnie umyć a następnie osuszyć dłonie.
- Nakłuć opuszek palca w celu pobrania krwi.
- Umieścić próbkę krwi na pasku testowym (w dołku).
- Nanieść 4 krople płynu testowego (dyluent).

Przeciwwskazania

- Wszystkie pozytywne wyniki testów muszą zostać potwierdzone przez lekarza lub uprawnionego pracownika służby zdrowia.
- Nie otwierać foliowego opakowania, aż nie będzie się gotowy do wykonania testu. Ogrzać saszetkę do temperatury pokojowej, zuz yć od razu po otwarciu.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku. Nie stosować ponownie.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić od światła i wilgoci.



- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

Uwagi

- Test jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku. Nie używać testu ponownie.
- Wszystkie pozytywne wyniki testów muszą zostać potwierdzone przez lekarza lub uprawnionego pracownika służby zdrowia.
- Nie używać po upływie terminu ważności.
- Nie używać, jeśli opakowanie foliowe jest uszkodzone (np. rozdarte, dziurawe) lub otwarte.
- Nie stosować, jeśli nasadka sterylna jest uszkodzona lub poluzowana.
- Nie używać żadnego innego roztworu poza płynem testowym, który był dołączony do testu.
- Nie używać butelki z płynem testowym, która została otwarta lub przecieka.
- Unikać kontaktu płynu testowego z oczami / skórą.
- Jeśli płyn testowy zostanie dodany do dołka bez krwi, test jest nieważny, nawet jeśli pojawi się linia kontrolna.
- Jeśli instrukcja nie jest należycie przestrzegana, wyniki mogą być fałszywe.
- Nie odczytuj wyników przed upłynięciem 15 minut ani po 20 minutach.

Producent

Atomo Diagnostics Ltd.
Level 1, 3-5 George Street
NSW, 2040 Leichhardt