

## Smoczek Calma w zestawie z butelką 250 ml



Cena: 27,00 zł

### Opis słownikowy

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Dla kogo        | Dla dziecka    |
| Opakowanie      | 1 zestaw       |
| Postać          | Butelka        |
| Producent       | MEDELA         |
| Rodzaj produktu | Wyrób medyczny |
| Wiek            | Dla dziecka    |

### Opis produktu

#### Opis

**Smoczek Calma marki Medela** został zaprojektowany z myślą o karmieniu niemowląt mlekiem matki w sposób maksymalnie zbliżony do naturalnego karmienia piersią, bez konieczności przyswajania nowych mechanizmów ssania. Jego innowacyjna i złożona konstrukcja nie tylko wyróżnia się wyglądem, ale także umożliwia dziecku swobodne oddychanie, pobieranie pokarmu oraz robienie przerw zgodnie z własnym rytmem. Dodatkowo, zapobiega połykaniu powietrza podczas karmienia. Uniwersalny kształt i rozmiar smoczka sprawiają, że może być stosowany przez cały okres karmienia mlekiem matki.

#### Stosowanie

Przed pierwszym użyciem i codziennie:

- rozłóż smoczek na części składowe, umyj i wypłucz wszystkie elementy zimną wodą pitną,
- włóż części smoczka do rondelka o odpowiedniej pojemności, nalej zimnej wody, tak aby wszystkie części były zanurzone, możesz dodać łyżeczkę kwasu cytrynowego, by uniknąć tworzenia się osadu,
- gotuj przez 5 minut, wyjmij akcesoria z podgrzewacza, usuń wodę i osusz wszystkie części czystym ręcznikiem.

Alternatywy dla gotowania:

- zmywarka: można myć w górnym koszu lub w koszyku na sztućce,
- kuchenka mikrofalowa: użyj woreczków do kuchenki mikrofalowej Medela Quick Clean™ lub innych rozwiązań pozwalających na dezynfekcję w

mikrofalowce.

Po każdym użyciu:

- zdemontuj wszystkie części i umyj w ciepłej wodzie z mydłem, następnie przepłucz w czystej wodzie,
- osusz części czystym ręcznikiem.



### Przeznaczenie

Do karmienia zdrowych niemowląt kobiecym pokarmem. Nie jest odpowiednia do podawania sztucznych mieszanek.

### Właściwości

Smoczek Calma firmy Medela umożliwia dziecku zachowanie zdrowych odruchów, które nabyło podczas ssania piersi, dzięki czemu dziecko po karmieniu smoczkiem Calma jest zrelaksowane i spokojne, jak również ma największy wpływ na tempo jedzenia. Podobnie jak w przypadku karmienia piersią dziecko musi wytworzyć podciśnienie, by popłynęło mleko. Innowacyjny system powstał we współpracy z ekspertami karmienia piersią z zespołu badań nad laktacją Hartmann Human Lactation Research z Uniwersytetu Australii Zachodniej.

Calma ma inny charakterystyczny, dłuższy kształt, który odpowiada długości kobiecej brodawki, tak by docierał w to samo miejsce w buzi niemowlęcia podczas karmienia. Produkt nie zawiera szkodliwego bisfenolu A.

### Uwagi

- Czyść części natychmiast po użyciu w celu uniknięcia zasychania pozostałości mleka oraz zapobiegania rozwijaniu się bakterii.
- Używaj szczoteczki ostrożnie, tak by nie uszkodzić części.
- Przed każdym użyciem skontroluj wszystkie części, uszkodzone lub zużyte części wymień.
- Ze względów higienicznych rekomenduje się wymianę smoczków co 3 miesiące.
- Zmiana barwy niektórych komponentów w trakcie używania nie ma wpływu na ich właściwości użytkowe.
- Przestrzegaj instrukcji mycia produktu, chyba, że personel medyczny udzielił innych wskazówek.
- Nie wystawiaj smoczka do karmienia na bezpośrednie działanie wysokiej temperatury ani promieni słonecznych, nie pozostawiaj go w środku dezynfekującym (roztworze sterylizującym) na dłużej niż jest to zalecane, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia smoczka.
- Unikaj dotykania wnętrza butelki i pokrywki.
- Stosuj tylko oryginalne akcesoria marki Medela.
- Nigdy nie używaj smoczków do karmienia jako środka uspokajającego.
- Nieprzerwane i długotrwałe ssanie przyczynia się do próchnicy zębów.
- Przed karmieniem zawsze sprawdź temperaturę pokarmu.
- Butelki i elementy nakrętki należy traktować z należytą dbałością. Plastikowe butelki i elementy nakrętki mogą stać się łamliwe na skutek zamrożenia i pęknąć w razie upadku. Butelki i elementy nakrętki mogą ulec uszkodzeniu na skutek niewłaściwego obchodzenia się z nimi, tj. upuszczenia, potrącenia lub nadmiernego dokręcenia.

### Producent

MEDELA AG  
Lattichstrasse 4b  
6340 Baar, Switzerland.