

# Sofargen Żel na skórę do użytku zewnętrznego 25 g

Cena: 31,32 zł



## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	SOFARGEN
Opakowanie	25 g (tub. Alu)
Postać	Żel
Producent	AVEC PHARMA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Nawilżające, Ochronne, Ułatwiające gojenie
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

## Opis produktu

### Opis

**Sofargen Gel** to produkt medyczny w postaci żelu przeznaczony do miejscowego stosowania na skórę. Opatrunek w formie żelu Sofargen zawiera sufladiazynę srebra i jest przeznaczony do zewnętrznego stosowania na niewielkie rany i oparzenia. Preparat jest również skuteczny w miejscowym leczeniu różnych urazów skóry, takich jak otarcia, zadrapania, podrażnienia skóry oraz inne powszechne problemy dermatologiczne.

### Składniki

Woda oczyszczona, glicerol, carbopol 974P, wodorotlenek sodu, mikronizowana sulfadiazyna srebra.

### Stosowanie

Do stosowania na:

- rany suche
- zmiany martwicze
- rany, otarcia, rany powierzchniowe, podrażnienia skóry
- małe oparzenia
- rany pękające
- rany pooperacyjne

### Zastosowanie

- Opatrunek w żelu z dodatkiem soli srebrowej sulfatiazolu (sulfadiazyny srebra).
- Do użytku zewnętrznego na rany i oparzenia niewielkich rozmiarów.
- Do stosowania jako środek nawilżający, aby utrzymać właściwą wilgotność rany i zapobiegać infekcjom, a także jako środek oczyszczający w celu usunięcia tkanki martwiczej oraz skrzepów.

### Sposób użycia

- Oczyszczyć odpowiednio ranę.
- Nanieść równomiernie warstwę 2-3 mm wyrobu na chorobowo zmieniony obszar skóry.

### Przeciwwskazania

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.
- Nie stosować dłużej niż 4 tygodnie.
- Nie stosować jednocześnie z innymi środkami dezynfekującymi płynnymi lub stałymi.
- Stosowanie u kobiet w ciąży, karmiących piersią i małych dzieci powinno zostać skonsultowane z lekarzem.

### Ostrzeżenia

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

### Ważne wskazówki

- Ze względu na zawartość jonów srebra żel może przebarwiać się na brązowo pod wpływem światła.
- Nie stosować z innymi środkami odkażającymi.

### Producent

Avec Pharma sp. z o.o.  
ul. Beżowa 2  
54-046 Wrocław

### Galeria

