

Softeye Blepha chusteczki okulistyczne, 14 sztuk

Cena: 31,54 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	14 sztuk
Postać	Chusteczki
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Przeznaczenie	Łagodzące, Oczyszczające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

SOFTEYE BLEPHA to jednorazowe chusteczki z naturalnej bawełny, nasączone roztworem zawierającym Hy-Ter (hialuronian sodu i naturalny ekstrakt z drzewa herbacianego) i aloes - o działaniu oczyszczającym, zmiękczającym, kojącym i udrażniającym.

Działanie

Produkt posiada działanie oczyszczające, zmiękczające, kojące i udrażniające. Przynosi szybką ulgę dzięki zawartości naturalnych składników odkażających i przeciwzapalnych.

Skład

Woda, PEG/PPG-20/15 dimetikon, wyciąg z aloesu zwyczajnego, Hy-Ter (hialuronian sodu, 4-terpineol), glicyryzynian amonu, glukozyd kaprylowo-kaprynowy, sól sodowa kokoiloaminokwasów pszenicy, etyloheksylogliceryna, alkohol fenyloetylowy, chlorek sodu, fosforan sodu, wodorofosforan sodu, PPG-26 Buteth-26, PEG-40 uwodorniony olej rycynowy.

Sposób użycia

- Przed użyciem wyrobu medycznego dokładnie umyć ręce.
- Otworzyć saszetkę i wyjąć chusteczkę.
- Rozłożyć chusteczkę, zamknąć oczy i delikatnie oczyścić powieki i rzęsy, w kierunku od wewnętrznego kącika oka do zewnętrznego.
- Powtarzać czynność przez kilka minut.
- Po użyciu umyć ręce.
- W trakcie stosowania wyrobu lub tuż po zakończeniu może być odczuwane lekkie, szybko przemijające uczucie pieczenia.
- Należy używać jednej chusteczki na jedno oko.
- Nie przemywać oka po zastosowaniu produktu.
- Aby produkt skuteczniej usunął wydzielinę z oka można zastosować go jako ciepły kompres. Należy zanurzyć zamkniętą saszetkę w ciepłej wodzie (do 45oC) na 10 minut. Zastosować niezwłocznie po ogrzaniu.



- W przypadku zaczerwienienia oka lub obrzęku powiek można zastosować produkt jako zimny kompres. Należy zanurzyć zamkniętą saszetkę w zimnej wodzie (nie niższej niż 5oC) przez 10 minut.

Przeciwwskazania

- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu.
- Nie stosować, jeśli opakowanie było wcześniej otwierane lub uszkodzone.
- Nie stosować po upływie terminu ważności.

Ostrzeżenia

- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej i unikać kontaktu z wodą.
- Produktu nie należy połykać.

Producent

NTC SRL
Via Lulgi Razza3, Włochy
Mediolan