

# Softeye Blepha Plus chusteczki okulistyczne x 14 szt. + ogrzewalny kompres

Cena: 35,12 zł



## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 zestaw
Postać	Chusteczki
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Przeznaczenie	Dezynfekujące (odkażające), Łagodzące (kojące), Oczyszczające, Przeciwwzapalne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

## Opis produktu

### Opis

**Chusteczki Softeye** przeznaczone do higieny powiek w zestawie z ogrzewalnym kompresem na oko mogą być używane codziennie zarówno przez dorosłych, jak i dzieci. Wykonane z naturalnej bawełny, nasączone aloesem i roztworem Hy-Ter, zawierającym hialuronian sodu i ekstrakt z drzewa herbacianego, chusteczki posiadają właściwości przeciwzapalne oraz odkażające. Dzięki temu szybko przynoszą ulgę oczom, skutecznie je oczyszczając, a także nadając im miękkość, co sprzyja udrażnianiu.

### Działanie

- Produkt posiada działanie oczyszczające, zmiękczające, kojące i udrażniające. Przynosi szybką ulgę dzięki zawartości naturalnych składników odkażających i przeciwzapalnych.
- W tylnym zapaleniu brzegów powiek dochodzi do zablokowania ujść gruczołów Meiboma. Zastosowanie ciepłego kompresu na oko w połączeniu z masażem powieki umożliwia odblokowanie i oczyszczenie ujść gruczołów. Dzięki temu, mogą one wznowić naturalną produkcję lipidów, niezbędnych do utrzymania w dobrym stanie filmu łzowego.

### Składniki

Woda, PEG/PPG-20/15 dimetikon, wyciąg z aloesu zwyczajnego, Hy-Ter (hialuronian sodu, 4-terpineol), glicyryzynian amonu, glukozyd kaprylowo-kaprynowy, sól sodowa kokoiloaminokwasów pszenicy, etyloheksylogliceryna, alkohol fenyletylowy, chlorek sodu, fosforan sodu, wodorofosforan sodu, PPG-26 Buteth-26, PEG-40 uwodorniony olej rycynowy.

### Zastosowanie

Higiena powiek i rzęs, a także pomocniczo:

- jako środek odkażający przed i po zabiegach chirurgicznych,
- w leczeniu bakteryjnego i alergicznego zapalenia spojówek,
- w zapaleniu spojówek i powiek.

#### Sposób użycia

- Rozgrzej kompres do momentu zmiany barwy z pomarańczowej na żółtą.
- Kompres można rozgrzać trzymając go pod gorącą wodą z kranu lub zanurzyć go w gorącej wodzie, do momentu zmiany barwy.
- Przed wykonaniem masażu oka zawsze należy sprawdzić temperaturę kompresu, przykładając go do wewnętrznej strony nadgarstka. Jeśli jest zbyt gorący, należy odczekać kilka minut i sprawdzić ponownie.
- Jeśli barwa nie jest jednorodna, potrząśnij kompresem przed użyciem.
- Trzymając kompres za skrzydełko, masować powiekę z lekkim naciskiem przez 3-5 minut.
- Bezpośrednio po masażu otworzyć saszetkę i wyjąć chusteczkę.
- Rozłożyć chusteczkę, zamknąć oczy i delikatnie oczyścić powieki i rzęsy, w kierunku od wewnętrznego kącika oka do zewnętrznego.
- Po użyciu umyć ręce.
- Należy używać jednej chusteczki na jedno oko.
- Nie przemywać oka po zastosowaniu produktu.
- Po użyciu opłukać kompres wodą i umieścić z powrotem w opakowaniu.

#### Przeciwwskazania

- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu.
- Tylko do użytku zewnętrznego, do stosowania w okolicach oczu, przy zamkniętych powiekach.
- Każda saszetka przeznaczona do jednorazowego użytku. Nie stosować ponownie zużytej chusteczki.
- Nie stosować, jeśli opakowanie było wcześniej otwierane lub uszkodzone.
- Nie stosować po upływie terminu ważności.

#### Ostrzeżenia

- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej i unikać kontaktu z wodą.
- Nie przebijać kompresu i nie połykać produktu.
- Po wykorzystaniu ostatniej chusteczki wyrzucić kompres.

#### Producent

NTC Srl  
Via Luigi Razza, 3  
20124 Mediolan  
Włochy