

Softeye Lipid 0,3 ml, 20 pojemników

Cena: 33,90 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	SOFTEYE
Opakowanie	20 pojemników po 0,3 ml
Postać	emulsja
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Przeznaczenie	Łagodzące (kojące), Nawilżające, Ochronne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Softeye Lipid to specjalny produkt medyczny przeznaczony do łagodzenia dolegliwości związanych z dyskomfortem oczu, niezależnie od ich źródła. Ta mlecznobiała emulsja do oczu jest wolna od konserwantów i składa się z wody oraz naturalnych lipidów. Jej działanie polega na nawilżaniu i nawadnianiu powierzchni oka, co przynosi ulgę w przypadku objawów suchości i podrażnienia. Softeye Lipid jest również odpowiedni dla osób korzystających ze sztucznych soczewek kontaktowych, pomagając złagodzić dyskomfort związany z ich noszeniem. Po zastosowaniu emulsji do worka spojówkowego, zarówno składniki wodne, jak i lipidowe łączą się z filmem łzowym, tworząc ochronną barierę, która ogranicza odparowywanie i utrzymuje nawilżenie oka.

Składniki

Olej sojowy, naturalne fosfolipidy, trometamol, glicerol, woda oczyszczona.

Zastosowanie

Objawy suchości i dyskomfortu ze strony oczu różnego pochodzenia.

Sposób użycia

1. Dokładnie umyj i osusz ręce.
2. Oderwij pojemnik od paska, otwórz go przekręcając i odrywając górną część.
3. Zakrop oczy unikając kontaktu końcówki pojemnika z okiem lub inną powierzchnią.

Przeciwwskazania

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.
- Nie stosować po upływie terminu ważności wyrobu medycznego.
- Nie stosować jeśli opakowanie jest uszkodzone.



Ostrzeżenia

- Zawartość pojemnika jednodawkowego należy zużyć bezpośrednio po otwarciu. Wszelkie pozostałości produktu nie mogą być używane, ponieważ Softeye Lipid nie zawiera konserwantów, a pozostałości produktu mogą ulec zanieczyszczeniu, tym samym narażając oko na ryzyko zakażenia.
- Po otwarciu zaleca się przechowywanie pozostałych pojemników jednodawkowych w tej samej aluminiowej torebce. Pojemniki jednodawkowe należy wykorzystać w ciągu 20 dni po otwarciu aluminiowej torebki.
- Produkt Softeye Lipid powinien być podawany dzieciom i osobom o ograniczonych zdolnościach manualnych jedynie pod nadzorem odpowiedzialnej osoby dorosłej.

Producent

SIFI S.p.A. – Via Ercole Patti, 36
95025 Aci S. Antonio (CT) – Włochy