

Sopelek 3+, aspirator do nosa, od urodzenia, vacuum + adapter + filtry do aspiratora, jednorazowe, 10 sztuk + podkłady higieniczne, 2 sztuki

Cena: 39,96 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka
Marka	SOPELEK
Opakowanie	1 sztuka
Postać	-
Producent	SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Oczyszczające, Udrażniające nos
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny, Akcesoria
Wiek	Dla dziecka

Opis produktu

Opis

Sopelek 3+ to wyrób medyczny przeznaczony do usuwania wydzieliny z nosa za pomocą ust lub jako aspirator do odkurzacza. Regularne oczyszczanie nosa pomaga zapobiegać lub ograniczać infekcje górnych dróg oddechowych, takie jak zapalenie gardła, ucha środkowego, czy zatok przynosowych, oraz wspiera leczenie schorzeń dolnych dróg oddechowych, w tym zapalenia krtani, tchawicy, oskrzeli i płuc. Jednorazowe nieprzemakalne podkłady medyczne SOPELEKbaby są przydatne podczas przewijania dziecka w domu, przychodni lub w podróży.

Zastosowanie

Dla dzieci i niemowląt do bezpiecznego usuwania wydzieliny i śluzu z nosa w przeziębieniach, zapaleniu zatok i schorzeniach, którym towarzyszy powstawanie wydzieliny.

Sposób użycia

- Przed pierwszym i każdym kolejnym użyciem sprawdzić wszystkie elementy czy poszczególne elementy nie są uszkodzone, następnie każdy element umyć w ciepłej wodzie.
- Włóż jednorazowy filtr do końcówki. Nałóż końcówkę z jednorazowym filtrem na cylinder główny aspiratora.
- Ułóż dziecko w dogodnej pozycji, umieść ustnik w swoich ustach, a końcówkę z jednorazowym filtrem w otworze nosowym dziecka. Delikatnie, progresywnie i jednostajnie wciągaj powietrze przez ustnik najpierw w jednym, następnie drugim tworze nosowym. Wyjmij zanieczyszczoną końcówkę z jednorazowym.
- Filtr z cylindra głównego. Filtr wyrzuć do kosza. Pozostałe elementy wyparz w gorącej wodzie (około 90 stopni Celsjusza) przez max. 15 sekund.

Wysusz wszystkie elementy i ułóż w pudełku.

- Instrukcja użytkowania aspirator do nosa Sopelek - odciąganie za pomocą odkurzacza. Metoda może służyć tylko do usuwania zalegającej wydzieliny.
- Przed pierwszym i każdym kolejnym użyciem sprawdzić wszystkie elementy czy poszczególne elementy nie są uszkodzone, następnie każdy element umyć w ciepłej wodzie.
- Włóż jednorazowy filtr do korka, a następnie korek do cylindra głównego. Nałóż końcówkę na cylinder główny aspiratora, a wąż połącz z adapterem z jednej strony i korkiem z drugiej. Włóż adapter do rury ssącej odkurzacza, odsuń odkurzacza na max. odległość od dziecka, następnie włącz urządzenie. Do procesu usuwania wydzieliny z noska używamy odkurzaczy o mocy 500-1800W. Ułóż dziecko w dogodnej pozycji i delikatnie dosuń końcówkę Aspiratora w pobliże jednego, następnie drugiego otworu nosowego dziecka (odciąganie powinno trwać max. 5 sekund, ruch góra- dół). UWAGA: nie zatykać otworu redukcyjnego (dziurka) w węży. Wyłącz odkurzacza, wyjmij zanieczyszczoną końcówkę z cylindra głównego, a jednorazowy filtr z korka. Filtr wyrzucić do kosza. Pozostałe elementy wyparzyć w gorącej wodzie (ok. 90°C) przez max. 15 sekund. Adapter i wężyk nie wymagają wyparzania, wystarczy przemyć ciepłą wodą. Wysusz wszystkie elementy i ułóż w pudełku.

Ważne wskazówki

- Z uwagi na umieszczony w korku adaptera otwór bezpieczeństwa siła ssąca odkurzacza jest zredukowana, dzięki czemu aspirator jest bezpieczny przy stosowaniu u dzieci.
- Jeżeli błona śluzowa nosa dziecka jest wysuszona lub widoczna jest duża ilość gęstej wydzieliny, zaaplikuj uprzednio do każdego otworu nosowego dziecka 3-4 krople soli fizjologicznej lub specjalnego donosowego roztworu wody morskiej.
- Aspirator Sopelek+ przechowuj w opakowaniu (pudełku) w suchym i czystym miejscu.
- Proces odciągania wydzieliny z nosa dziecka może zostać przeprowadzony tylko przez osobę dorosłą.
- Do procesu odciągania można zastosować odkurzacza o max mocy 1000 Wat.
- Nie stosować aspiratora w przypadku uszkodzeń błony śluzowej nosa, krwawienia lub hemofilii.
- Jednorazowe nieprzemakalne podkłady medyczne Sopelek baby są przeznaczone do użytku jednorazowego.
- Podkłady uszkodzone, zawilgocone lub mokre nie nadają się do użycia.

Producent

Salus International Sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 9
40-273 Katowice