

Sorbact, opatrunek chirurgiczny, 10 x 20 cm, 1 sztuka



Cena: 24,92 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Opatrunek
Producent	ABIGO MEDICAL AB
Przeznaczenie	Ochronne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Sorbact to opatrunek chłonny przeznaczony do pielęgnacji ran suchych oraz o umiarkowanym stopniu wysięku.

Działanie

Metoda zastosowana w produktach Sorbact opiera się na tym, że w obecności wody powierzchnie hydrofobowe (odpychające wodę) wiążą się ze sobą. Ze względu na zawartość wysoce hydrofobowego związku zielone włókno produktów Sorbact® wiąże mikroorganizmy hydrofobowe, takie jak bakterie szczepów *Staphylococcus aureus* (w tym gronkowiec złocisty oporny na metycylinę), *Streptococcus*, *E. coli*, *Pseudomonas aeruginosa* oraz grzyby, takie jak *Candida albicans*. Mikroorganizmy te są usuwane z rany przy każdej zmianie opatrunku. Organizmy niehydrofobowe nie zostaną związane ani usunięte z rany. Kliniczne znaczenie tego zjawiska nie jest znane.

Sposób użycia

- Ranę należy zaopatrzyć zgodnie z lokalnie przyjętą praktyką kliniczną.
- Produkt Sorbact należy wyjmować z opakowania, przestrzegając zasad aseptyki.
- Opatrunek należy przyciąć do pożądanego kształtu. Istotne jest zapewnienie bezpośredniego kontaktu zielonego włókna z powierzchnią rany.
- W przypadku Sorbact Surgical Dressing (Sorbact opatrunek chirurgiczny) usunąć folię ochronną ze spodniej strony opatrunku i przyłożyć opatrunek do rany. Docisnąć krawędzie opatrunku i usunąć z wierzchu folię stabilizującą. Rozpocząć w miejscu niebieskiego oznaczenia.
- W przypadku ran otwartych produkty Sorbact należy stosować tak, aby zapewnić bezpośredni kontakt z całą powierzchnią rany. Rozłożyć jeden kompres lub taśmę z gazy (lub więcej kompresów/taśm), a następnie wyłożyć/wypełnić jamę rany. Nie upychać gęsto.
- W przypadku ran otwartych i przetok należy zawsze pozostawiać wystającą część opatrunku, tak aby można go było łatwo usunąć. Jeśli jest zalecane przycięcie taśmy z gazy Sorbact, pozostawić przycięty koniec poza przetoką, aby wystające włókna bawełniane nie dostały się do wnętrza przetoki.
- Częstość zmieniania opatrunku zależy od stopnia wysięku. Opatrunek należy zmieniać przynajmniej dwa razy w tygodniu.



Przeciwwskazania

- Jeżeli leczony stan pogarsza się lub nie ulega poprawie, należy skonsultować się z lekarzem. Nie używać ani nie sterylizować ponownie. Jeśli opatrunek jest przycinany, należy wyrzucić wszystkie otwarte i niewykorzystywane opatrunki.
- Nie należy używać, jeśli jałowe opakowanie zostało otwarte lub uszkodzone.
- Nie należy stosować produktów Sorbact u osób ze stwierdzoną wrażliwością na którykolwiek ze składników produktu. Zieloną hydrofobową powierzchnię opatrunku należy zawsze nakładać bezpośrednio na ranę, aby zapewnić odpowiednie wiązanie mikroorganizmów do opatrunku. Wilgotne środowisko rany jest konieczne, aby zapewnić działanie produktu Sorbact® i uniknąć jego ewentualnego przyklejenia się do rany. Jeśli opatrunek wyschnie lub przyklei się do rany, należy zwilżyć lub zmoczyć opatrunek, aby ułatwić jego usunięcie i uniknąć naruszenia gojącej się rany.
- Nie należy stosować produktów Sorbact z tłustymi maściami, kremami ani roztworami hydrofobowymi (np. środkami do oczyszczania ran), ponieważ zmniejszają one skuteczność wiązania mikroorganizmów hydrofobowych.

Ostrzeżenia

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

ABIGO MEDICAL