

Sorbact Superabsorbent, 10 x 20 cm, opatrunek wiążący bakterie, 1 opatrunek



Cena: 31,13 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Opatrunek
Producent	SYMPHAR SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Ochronne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Sorbact Superabsorbent to jałowy opatrunek z superabsorbentem, który skutecznie wiąże bakterie i grzyby. Składa się z zielonej warstwy Sorbact do bezpośredniego kontaktu z raną, superchłonnej warstwy wewnętrznej oraz białej, wodoszczelnej warstwy zewnętrznej zatrzymującej wysięk. Opatrunek wchłania i utrzymuje wysięki, zmniejszając ryzyko maceracji tkanek i wspierając wilgotne środowisko w ranie. Dzięki wysokiej chłonności redukuje częstotliwość zmian opatrunków i może być stosowany w terapii kompresyjnej.

Działanie

- Sorbact Superabsorbent jest przeznaczony do zaopatrywania ran oczyszczonych, zanieczyszczonych, skolonizowanych lub zakażonych z dużym lub bardzo dużym wysiękiem, takich jak rany chirurgiczne, pourazowe, odleżynowe, owrzodzenia cukrzycowe oraz owrzodzenia stóp i nóg.
- Sorbact wiąże mikroorganizmy, takie jak bakterie szczepów *Staphylococcus aureus* (w tym gronkowiec złocisty oporny na metycylinę – MRSA), *Streptococcus species*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* oraz grzyby, takie jak *Candida albicans*, co wykazano w warunkach *in vitro*. Mikroorganizmy te są usuwane z rany przy każdej zmianie opatrunku.

Sposób użycia

- Zaopatrzyć ranę zgodnie z lokalnie przyjętą praktyką kliniczną.
- Wybrać rozmiar opatrunku odpowiedni do danej rany. Opatrunek powinien całkowicie przykrywać ranę i wychodzić poza jej brzegi na co najmniej 2 cm.
- Wyjąć opatrunek z opakowania stosując technikę aseptyczną.
- Nałożyć opatrunek na ranę. Upewnić się, że zielona warstwa opatrunku styka się bezpośrednio z raną na całej jej powierzchni.
- Brzegi opatrunku zabezpieczyć taśmą lub owinąć bandażem. Sprawdzić, czy zastosowane mocowanie umożliwia zwiększenie objętości przez opatrunek.
- Częstość zmiany opatrunku zależy od stopnia wysięku oraz ogólnego stanu rany i otaczającej ją skóry. Kiedy opatrunek

wchłonie wysięk i zwiększy objętość, należy go wymienić. O ile sytuacja kliniczna na to pozwoli, można pozostawić opatrunek przez maksymalnie 7 dni.

Ostrzeżenia

- Jeśli stan leczonej rany pogarsza się bądź nie ulega poprawie lub jeśli występują działania niepożądane, należy skonsultować się z lekarzem lub odpowiednim pracownikiem opieki zdrowotnej.
- Nie należy nakładać na oczy, błony śluzowe ani umieszczać w jamie rany. Po wchłonięciu płynu opatrunek znacznie zwiększa swoją objętość.
- Nie należy stosować w przypadku krwawień tętniczych ani mocno krwawiących ran.
- Nie należy stosować u pacjentów ze znaną nadwrażliwością na którykolwiek składnik opatrunku. Zieloną powierzchnię kontaktową opatrunku należy zawsze nakładać bezpośrednio na ranę, aby umożliwić wiązanie mikroorganizmów z opatrunkiem.
- Jeśli opatrunek wyschnie lub przyklei się do rany, należy go zwilżyć lub namoczyć, aby ułatwić jego usunięcie i uniknąć naruszenia gojącej się rany.
- Nie należy stosować z tłustymi substancjami, na przykład maściami, kremami lub roztworami, ponieważ mogą one zmniejszyć skuteczność wiązania mikroorganizmów.
- Sorbact Superabsorbent jest przeznaczony do jednorazowego użytku i nie powinien być ponownie używany. Ponowne użycie może prowadzić do zwiększonego zagrożenia infekcją lub zanieczyszczeniem krzyżowym.
- Nie sterylizować.
- Nie przycinać opatrunku.
- Nie należy używać, jeśli opakowanie zostało uszkodzone.
- Należy usunąć opatrunek Sorbact Superabsorbent przed zabiegiem radioterapii.
- Po zabiegu można nałożyć nowy opatrunek. Opatrunki Sorbact Superabsorbent można stosować podczas obrazowania metodą rezonansu magnetycznego.

Producent

ABIGO MEDICAL