

Sorbact, taśma z gazy, 2 cm x 50 cm, 1 sztuka



Cena: 12,46 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Opatrunek
Producent	SYMPHAR SP. Z O.O.
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Sorbact opatrunek na rany trudnogojące się.

Wskazania

Leczenie różnego typu zanieczyszczonych, sączących się, skolonizowanych i zainfekowanych ran, niezależnie od przyczyny. Sorbact może być także stosowany w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia „czystych” ran lub w leczeniu zakażeń grzybiczych w fałdach skórnych.

Działanie

Mechanizm działania Sorbact oparty jest na wiedzy, że powierzchnie hydrofobowe (odpychające wodę) wiążą się ze sobą. Większość patogennych bakterii i grzybów wywołujących choroby posiada hydrofobową powierzchnię i dlatego wiąże się z powierzchnią Sorbact.

Sposób użycia

Sposób użycia: jest ważne, aby tkanina Sorbact miała bezpośredni kontakt z raną lub z miejscem zakażonym grzybami (zielona powierzchnia musi przylegać do rany lub miejsca zakażonego grzybami).

- Rany powierzchowne sączące się.

Oczyścić ranę, zgodnie z zaleceniami.

Delikatnie przyciskać powierzchnię rany okrągłym gazikiem Sorbact. Zaleca się zmieniać gazik kilka razy.

Przykryć ranę opatrunkiem adsorbującym Sorbact (zieloną powierzchnią do rany).

Przymocować opatrunek plasterem lub bandażem.

- Rany głębokie sączące się.

Oczyścić ranę, zgodnie z zaleceniami.

Delikatnie przyciskać powierzchnię rany okrągłym gazikiem Sorbact. Zaleca się zmieniać gazik kilka razy.

Rozwinąć jeden lub kilka kompresów lub taśmę z gazy Sorbact i wypełnić niszę rany (nie upychać). Przykryć ranę opatrunkiem

adsorbującym Sorbact (zieloną powierzchnią do rany).

Należy zawsze zostawić fragment opatrunku poza niszą głębokiej rany, co ułatwi jego późniejszą wymianę.

- Przetoki.

Do przetoki włożyć taśmę z gazy odpowiedniego rozmiaru. Jeśli trzeba pociąć taśmę, należy złożyć ją na pół i włożyć do przetoki, zostawiając oba końce na zewnątrz otworu przetoki. Przykryć opatrunkiem adsorbującym Sorbact (zieloną powierzchnią do rany).

- Zakażenia grzybicze w fałdach skóry.

Na powierzchnię zakażoną grzybami nałożyć szeroką taśmę z gazy lub kompres. Przymocować za pomocą bielizny (biustonosz, majtki, slipki). Jeśli to konieczne - dodatkowo przymocować plastrem, na zewnątrz zakażonej powierzchni.

Zmieniać opatrunek codziennie. Kontynuować leczenie jeszcze kilka dni po ustąpieniu objawów.

- Zakażenia grzybicze między palcami stóp.

Umieścić taśmę z gazy 2 cm x 50 cm pomiędzy palcami stóp (luźno, tzw. „zygzakiem”) i przymocować do górnej powierzchni stopy. Zmieniać opatrunek codziennie.

Uwagi

Sorbact nie należy używać razem z tłustymi maściami stosowanymi na rany lub na miejsca zakażone grzybami, ponieważ takie skojarzone leczenie może być mniej skuteczne.

Producent

ABIGO MEDICAL AB