

Sorbact, taśma z gazy, 5 cm x 200 cm, 1 sztuka

Cena: 31,12 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Opatrunek
Producent	SYMPHAR SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Wspomagające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Sorbact to specjalistyczna taśma wykonana z gazy, która działa poprzez adsorpcję bakterii – wiąże je na swojej powierzchni, wspomagając proces oczyszczania ran i zapobiegania infekcjom.

Wskazania

Leczenie różnego typu zanieczyszczonych, sączących się, skolonizowanych i zainfekowanych ran, niezależnie od przyczyny. Sorbact może być także stosowany w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia „czystych” ran lub w leczeniu zakażeń grzybiczych w fałdach skórnych.

Działanie

Mechanizm działania Sorbact oparty jest na wiedzy, że powierzchnie hydrofobowe (odpychające wodę) wiążą się ze sobą. Większość patogennych bakterii i grzybów wywołujących choroby posiada hydrofobową powierzchnię i dlatego wiąże się z powierzchnią Sorbact.

Sposób użycia

Ważne jest, aby tkanina Sorbact miała bezpośredni kontakt z raną lub z miejscem zakażonym grzybami (zielona powierzchnia musi przylegać do rany lub miejsca zakażonego grzybami).

Uwagi

Sorbact nie należy używać razem z tłustymi maściami stosowanymi na rany lub na miejsca zakażone grzybami, ponieważ takie skojarzone leczenie może być mniej skuteczne.

Producent

ABIGO MEDICAL AB