

Stick Off, spray do bezbolesnego usuwania plastrów, 50 ml

Cena: 58,91 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	50 ml
Postać	Spray
Producent	CHIESI POLAND SP. Z O.O.
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Stick Off to spray do bezbolesnego usuwania plastrów, który skutecznie usuwa różne rodzaje plastrów, takie jak włókninowe, wodoodporne, hormonalne i nikotynowe, a także kinesiotejpę, opatrunki samoprzylepne, przylepce i taśmy mocujące. Może być stosowany przez osoby w każdym wieku, w tym noworodki, niemowlęta, dzieci, dorosłych i kobiety w ciąży. Spray jest bardzo wygodny i łatwy w użyciu, aplikowany pod dowolnym kątem, co sprawia, że nadaje się idealnie do trudno dostępnych miejsc. Całkowicie usuwa klej ze skóry, nie podrażniając jej i nie wysuszając. Dodatkowo szybko wysycha, pozostawiając skórę gotową do nałożenia kolejnego opatrunku. Produkt nie zawiera alkoholu.

Składniki

Heksametylodysiloksan.

Zastosowanie

- Spray do bezbolesnego usuwania wszelkiego rodzaju opatrunków samoprzylepnych, taśm mocujących i przylepców. m.in.: włókninowych, wodoodpornych, kinesiotejp, hormonalnych i nikotynowych.
- Odpowiedni do stosowania u noworodków (również urodzonych przedwcześnie), niemowląt, dzieci i dorosłych, w tym kobiet w ciąży.

Sposób użycia

Opatrunki na włókninie:

- Nanieś spray na powierzchnię opatrunku i odczekaj kilka sekund.
- Po upływie wskazanego czasu delikatnie usuń opatrunek.

Plastry wodoodporne, kinesiotejp, plastry nikotynowe i inne:

- Odklej róg opatrunku i nanieś spray pod jego krawędź.

- Następnie delikatnie odklej plaster, jednocześnie aplikując kolejną dawkę preparatu.

U noworodków lub w okolicach oczu:

- Do nasadki zabezpieczającej nanieść niewielką ilość preparatu i zamocz patyczek higieniczny.
- Następnie za pomocą patyczka nanieść preparat na opatrunek.
- Odczekaj kilka sekund, po czym delikatnie usuń opatrunek.

Ostrzeżenia

- Nie stosować w przypadku uczulenia lub nadwrażliwości na składnik wyrobu.
- Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem. Ogrzanie grozi wybuchem. Przechowywać z dala od źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przepłukiwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury wyższej niż 50°C/122°F. Unikać uwolnienia do środowiska - po zużyciu zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Chronić przed dziećmi.

Ważne wskazówki

- Preparat może być stosowany jedynie zgodnie z dołączoną do opakowania instrukcją.
- Nie używać jeśli opakowanie jest uszkodzone.
- Nie używać po upływie daty ważności.
- W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej natychmiast zaprzestać stosowania wyrobu obficie opłukać skórę czystą wodą i zwrócić się do lekarza.
- Preparat przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego.
- Stosować w pomieszczeniach wentylowanych.
- Nie stosować bezpośrednio na oczy. W przypadku dostania się preparatu do oczu natychmiast płukać je obficie czystą wodą przez minimum 10 minut, unikając silnego strumienia wody, ze względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki. Jeżeli objawy podrażnienia utrzymują się należy poradzić się lekarza.
- Nie połykać. W przypadku połknięcia nie prowokować wymiotów. Dokładnie wypłukać jamę ustną wodą. Jeśli wystąpią objawy zatrucia bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Producent

EmergoPharma Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Józefa Piłsudskiego 11
05-510 Konstancin-Jeziorna