

Stop Hemo, opatrunek donosowy na krwawienie, 5 sztuk

Cena: 14,67 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	5 sztuk
Postać	Opatrunek
Producent	ELEKTRO-OXIGEN POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Tamujące
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Stop Hemo to opatrunek przeznaczony do tamowania krwawień z nosa oraz innych ran, szczególnie u osób z problemami krzepnięcia krwi. Po kontakcie z krwią materiał przekształca się w żel, co ułatwia jego późniejsze usunięcie. Produkt wykonano z naturalnych włókien alginianowych, które wspierają szybsze gojenie się ran.

Wskazania

Krwawienie z nosa, krwawienie powierzchowne, krwawienie z jamy ustnej, usunięcie zęba, rany powierzchowne, rany chirurgiczne do 8 cm kwadratowych, rany spowodowane urazami (zadrapania, przecięcia, otarcia, otwarte pęcherze, oparzenia powierzchowne).

Dawkowanie

1. Krwawienie z nosa: lekko pochylając się do przodu, delikatnie wydmuchać nos w celu usunięcia skrzepów. Otworzyć opakowanie wzdłuż linii przerywanej. Chwycić końcówki opatrunku, a następnie skrócić i złożyć na pół, aby utworzyć zwarty tampon. Stop Hemo można zwilżyć wyłącznie roztworem soli fizjologicznej (NaCl 0,9%), aby ułatwić wprowadzenie opatrunku do jamy nosowej. Wprowadzić opatrunek Stop Hemo do jamy nosowej i uciskać nos przez 10 minut. Opatrunek pozostawić w jamie nosowej przez minimum 30 minut, a maksymalnie przez 24 godziny.
2. Krwawienie z jamy ustnej (usunięcie zęba, krwawienie z wargi, dziąsła, języka,...). Opatrunek Stop Hemo zastosować na ranę i usunąć po ustaniu krwawienia.
3. Rany powierzchniowe: oczyścić ranę wodą z mydłem (lub roztworem soli fizjologicznej NaCl 0,9%). Opatrunek zastosować na ranę, a następnie usunąć po ustaniu krwawienia, lub pozostawić w miejscu rany w celu wykorzystania leczniczego działania opatrunku i usunąć w ciągu 24 godzin. Jeżeli krwawienie nie ustępuje, należy skontaktować się z lekarzem.

Skład

Włóknina z alginianu wapnia (pochodzenia roślinnego).

Ostrzeżenia

Opatrunek Stop Hemo można zwilżać wyłącznie roztworem soli fizjologicznej. Nie wolno używać wody jałowej. Opatrunek należy usunąć w ciągu 24 godzin. Wyrób jednorazowego użytku, ponowne użycie może spowodować ryzyko zakażenia, a produkt może nie działać. Opatrunek zawiera śladowe ilości surfaktantów i może powodować podrażnienia u osób wrażliwych na ten składnik.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

Producent

ELEKTRO-OXIGEN POLSKA SP. Z O.O.