

Super Seni, pieluchomajtki dla dorosłych, rozmiar M, 30 sztuk

Cena: 69,90 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	SENI
Opakowanie	30 sztuk
Postać	pielucha
Producent	TORUŃSKIE ZAKŁ. MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Super Seni to pieluchomajtki, rozmiar M, 30 sztuk, polecane dla mężczyzn i kobiet z średnim stopniem nietrzymania moczu i/lub inkontynencji kałowej. Są uniwersalne, odpowiednie dla osób mobilnych i unieruchomionych, wykonane z miękkich, oddychających materiałów, minimalizujących ryzyko odparzeń i podrażnień skóry. Przylepcorzepty umożliwiają wielokrotne odpinanie i zapinanie, a wskaźnik wilgotności informuje o konieczności zmiany wyrobu. Chłonność: 6/9, tzw. chłonność dzienna.

Wskazania

Super Seni, klasyczne oddychające pieluchomajtki, to dobre i sprawdzone zabezpieczenie przeznaczone zarówno dla osób aktywnych, jak i dla tych o ograniczonej mobilności. Pieluchomajtki Super Seni przeznaczone są dla osób ze średnim stopniem nietrzymania moczu. Super Seni mogą być stosowane zarówno przy nietrzymaniu moczu, jak i przy inkontynencji kałowej.

Działanie

Super Seni to klasyczne, uniwersalne pieluchomajtki dla osób ze średnim stopniem nietrzymania moczu oraz inkontynencją kałową. Posiadają specjalną włókninę rozpraszającą wilgoć, która umożliwia szybsze i dokładniejsze rozpraszanie wilgoci wewnątrz wkładu, zapewniając poczucie suchości. Dopasowane do ciała, osłonki boczne, zostały wykonane ze specjalnej hydrofobowej włókniny i chronią przed przeciekaniem wilgoci na zewnątrz produktu.

Specjalna struktura warstwy zewnętrznej pieluchomajtek pozwala na swobodny przepływ powietrza, dzięki czemu skóra może swobodnie oddychać, przy jednoczesnym nieprzepuszczaniu cieczy. Zmniejsz to ryzyko powstawania odleżyn i podrażnień. Również w obrębie części biodrowej produkt umożliwia swobodną cyrkulację powietrza.

Indykator wilgotności zamieszczony na produkcie informuje o stopniu napełnienia wkładu chłonnego i konieczności wymiany wyrobu na nowy. Superabsorbent użyty w pieluchomajtkach zwiększa jego możliwości chłonne, dodatkowo wykazuje działanie antybakteryjne, dzięki czemu redukuje rozwój bakterii będących przyczyną przykrego zapachu.

Dzięki zastosowaniu przylepcorzeptów i elastycznego ściągacza na wysokości talii pieluchomajtki idealnie dopasowują się do ciała, dodatkowo są elastyczne na całym obwodzie, zwiększa swobodę ruchów oraz poczucie komfortu. Dzięki anatomicznemu kształtowi

pieluchomajtki dopasowują się do ciała minimalizując ryzyko otarć mechanicznych. Przylepcorzepy są wielokrotnego użytku, nie odkształcają się. Dyskrecję i wygodę stosowania zwiększa zwężony wkład chłonny w kroku z obrzeży do części środkowej.

Skład

Wyrób nie zawiera lateksu.

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony dla osób aktywnych, samodzielnych jak również dla osób leżących, wymagających opieki, ze średnim stopniem nietrzymania moczu, o obwodach pasa i bioder mieszczących się w przedziale 75-110 cm.

Sposób użycia

Zakładanie na stojąco – samodzielnie lub z pomocą opiekuna:

- Aktywowane pieluchomajtki włóż między nogi trzymając produkt ułożony w formie łódki.
- Uwagi dla opiekuna: możesz włożyć pieluchomajtki od przodu lub od tyłu – aby odciążyć plecy, wybierz sposób, który jest dla Ciebie wygodniejszy w danej sytuacji.
- Dopasuj pieluchomajtki z tyłu i z przodu tak, aby dokładnie przylegały do ciała.
- Uwagi dla opiekuna: Zwróć uwagę, aby indykator wilgotności znajdował się na przedłużeniu linii kręgosłupa. Podopieczny może pomóc w zakładaniu pieluchomajtek przytrzymując je z przodu na podbrzuszu.
- Umocuj pieluchomajtki za pomocą elastycznych przylepcorzepów, zaczynając od dolnego zapięcia, które przyczep lekko skośnie do góry. Po umocowaniu dolnych zapięć, umocuj górne przylepcorzepy, dopasowując pieluchomajtki do talii.
- Po zapięciu pieluchomajtek upewnij się, czy pielucha dobrze leży i przylega do ciała, czy osłonki nie są zwinięte i czy w żadnym miejscu pielucha nie wpija się w ciało.
- Zużyte pieluchomajtki zwiń i wyrzuć do kosza na śmieci.
- Nie wyrzucaj zużytego wyrobu do toalety!

Zakładanie na osobę leżącą:

- Stań z brzegu łóżka i zegnij w kolanie jedną z nóg chorego.
- Uwaga: jeśli stoisz po prawej stronie chorego, zegnij jego lewą nogę, jeśli stoisz po jego lewej stronie – zegnij nogę prawą.
- Obróć chorego na bok i po dokonaniu czynności pielęgnacyjnych podłóż z tyłu pod chorego aktywowane wcześniej pieluchomajtki.
- Uwaga: Pamiętaj o tym, aby podwinąć skrzydło pieluchomajtek, co umożliwi wyjęcie ich spod chorego po jego obróceniu na plecy. Zwróć uwagę, aby indykator wilgotności znajdował się na przedłużeniu linii kręgosłupa.
- Połóż chorego na plecach, wyprostuj jego nogi i wyciągnij podwinięte skrzydło pieluchomajtek.
- Wyciągnij przednią część pieluchomajtek i dopasuj ją do krocza.
- Umocuj pieluchomajtki za pomocą elastycznych przylepcorzepów, zaczynając od dolnego zapięcia, które przyczep lekko skośnie do góry. Po umocowaniu dolnych zapięć, umocuj górne przylepcorzepy, dopasowując pieluchomajtki do talii.
- Po zapięciu pieluchomajtek upewnij się, czy pielucha dobrze leży i przylega do ciała, czy osłonki nie są zwinięte i czy w żadnym miejscu pielucha nie wpija się w ciało.
- Zużyte pieluchomajtki zwiń i wyrzuć do kosza na śmieci.
- Nie wyrzucaj zużytego wyrobu do toalety!

Uwagi

Testowane dermatologicznie.

Producent

TZMO-SENI
Żółkiewskiego 20/26
Toruń