

Suprasorb P, 7,5 cm x 7,5 cm, samoprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej, 1 opatrunek



Cena: 8,15 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Opatrunek
Producent	LOHMANN & RAUSCHER POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Nawilżające, Ochronne, Wspierające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Suprasorb P, opatrunek z pianki poliuretanowej bez kleju, składa się z dwóch warstw poliuretanowych: warstwy nośnej i piankowej. Każdy egzemplarz jest indywidualnie pakowany, gotowy do użytku i sterylizowany promieniowaniem Gamma. Opatrunek przeznaczony jest wyłącznie do jednorazowego użytku i nie podlega ponownej sterylizacji.

Wskazania

- Przewlekłe owrzodzenia,
- Epidermolysis bullosa

Działanie

- Materiał dopasowuje się dołożyska rany.
- Specjalna struktura warstwy kontaktowej opatrunku Suprasorb P jest delikatna dla powierzchni podatnych na zranienia, takich jak gojące się rany.
- Półprzepuszczalny poliuretanowy materiał nośny zapewnia wilgotne środowisko rany.
- Również po wchłonięciu płynu kształt opatrunku nie ulega zmianie.
- Nie przepuszcza bakterii i płynów.

Sposób użycia

- Przygotowanie rany: Rana musi być starannie oczyszczona w sposób standardowy i następnie osuszona kompresikami. Otoczenie rany musi być suche, odtłuszczone i czyste
- Zakładanie opatrunku: Wielkość opatrunku zależy od wielkości rany. Otworzyć sterylne opakowanie i wyjąć opatrunek. Założyć opatrunek na ranę i zamocować odpowiednim opatrunkiem wtórnym.



- Zmiany opatrunku: Okresy w jakich powinien być zmieniany opatrunek z pianki poliuretanowej Suprasorb P ustala lekarz prowadzący w zależności od stanu rany. Opatrunek musi zostać zmieniony, jeżeli wydzielina już tak wypełnia piankę, że zaczyna ona wystawać poza brzegi rany.

Ostrzeżenia

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Wyrób medyczny jednokrotnego użytku.

Producent

LOHMANN & RAUSCHER