

Suprasorb P, opatrunek jałowy, samoprzylepny, 10 x 10 cm, 1 sztuka



Cena: 11,54 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Opatrunek
Producent	LOHMANN & RAUSCHER POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Ochronne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Suprasorb P to sterylny opatrunek medyczny z samoprzylepnej pianki poliuretanowej o wymiarach 10 x 10 cm.

Wskazania

Suprasorb P przeznaczony jest do opatrywania powierzchniowych, średnio sączących się ran np.: odleżyny, owrzodzenia. Ze względu na swą elastyczność nadaje się do użycia w trudnodostępnych miejscach ciała. Może także zostać z powodzeniem wykorzystany jako opatrunek wtórny.

Działanie

Opatrunek wchłania powstający w ranie wysięk, jednocześnie zapewniając jej optymalne, wilgotne środowisko. Produkt nie przywiera do rany, jest bezbolesny w usuwaniu, a jego zmiana nie powoduje uszkodzenia gojącej się tkanki.

Skład

Opatrunek składa się z 3 warstw: poliuretanowej warstwy nośnej pokrytej klejem poliakrylowym, poliuretanowej warstwy piankowej dodatkowo zaopatrzonej w perforowaną warstwę będącą w bezpośrednim kontakcie z raną. Każdy opatrunek został wysterylizowany za pomocą tlenu etylenu.

Sposób użycia

1. Starannie oczyścić i osuszyć ranę. Jej otoczenie powinno być suche, odtłuszczone i czyste.
2. Otwórz sterylne opakowanie, zerwij warstwę ochronną i umieść opatrunek w pożądanym miejscu. Lekko dociśnij i wygładź go na brzegach.
3. Opatrunek może pozostać na ranie przez 5-7 dni.

Ostrzeżenia



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

- Nie stosować na rany zainfekowane.
- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub alergii na którykolwiek ze składników.
- Produkt jednorazowego użytku. Nie sterylizować ponownie.

Uwagi

Podczas opatrywania żylakowatych owrzodzeń podudzi należy kontynuować terapię kompresyjną, natomiast w przypadku owrzodzeń odleżynowych należy zmniejszyć nacisk.

Producent

LOHMANN & RAUSCHER
Moniuszki 14
Pabianice