

Sutricon Kids, silikonowe plastry na blizny dla dzieci, 3 x 7 cm, 5 sztuk

Cena: 92,60 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka
Opakowanie	5 sztuk
Postać	Plastry
Producent	VERCO
Przeznaczenie	Blizny
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dziecka, Dla młodzieży

Opis produktu

Opis

Sutricon Kids to silikonowe plastry na blizny przeznaczone dla dzieci od 6. miesiąca życia. Dzięki innowacyjnej strukturze i farmaceutycznemu żelowi silikonowemu, plastry pomagają poprawić wygląd i elastyczność blizn. Ich działanie, zbliżone do naturalnych właściwości skóry, pozwala na przepuszczalność tlenu i zapobiega nadmiernej utracie wody przez naskórek. Plastry zmniejszają dyskomfort związany z bliznami, taki jak ból, swędzenie czy uczucie ciągnięcia. Dodatkowo, mają nadruk zabawnych zwierzątek, co tworzy efekt tatuażu po ich aplikacji.

Wskazania

Plastry silikonowe na blizny Sutricon Kids przeznaczone są dla dzieci od 6. miesiąca życia, do leczenia:

- blizn pooperacyjnych,
- blizn pooperacyjnych,
- blizn po cesarskim cięciu,
- blizn pourazowych,
- w zapobieganiu nieprawidłowemu bliznowaceniu,
- w zmniejszeniu widoczności blizn świeżych i dojrzałych.

Działanie

- Plastry silikonowe Sutricon Kids są efektywne w leczeniu zarówno świeżych, jak i dojrzałych blizn.
- Zmniejszają bliznę i poprawiają jej wygląd. Efekt tatuażu z zabawnymi zwierzątkami dodatkowo uprzyjemniają dzieciom czas leczenia blizn.
- Są wygodne w stosowaniu – w przeciwieństwie do maści nie brudzą ubrań, nie są tłuste i kleiste.
- Plastry na blizny Sutricon Kids są ultracienkie (0,25 mm) oraz przezroczyste, dzięki czemu są prawie niewidoczne na skórze.
- Dzięki swojej elastyczności dopasowują się do anatomicznych kształtów ciała.

- Charakteryzują się doskonałą adhezyjnością (przyczepnością), dzięki czemu możliwa jest wielokrotna aplikacja.
- Plastry Sutricon Kids posiadają półprzepuszczalną membranę, dzięki czemu pozwalają oddychać skórze.
- Plastry silikonowe mogą być stosowane nawet przez alergików, na wszystkie obszary skóry, także te wrażliwe.

Skład

Żel silikonowy, elastyczna membrana poliuretanowa.

Sposób użycia

- Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać ulotkę dołączoną do opakowania, ponieważ powodzenie terapii zależy od prawidłowego stosowania preparatu Sutricon Kids.
- Plaster można używać po całkowitym zagojeniu rany i po zdjęciu szwów.
- Przed użyciem należy dokładnie oczyścić i osuszyć bliznę.
- W celu dopasowania wielkości plastra do powierzchni blizny, możliwe jest jego docięcie w dowolny sposób.
- Plastry silikonowe na blizny należy zmieniać średnio co 3 do 5 dni, jednak najlepsze efekty uzyskuje się wymieniając je co 24 godziny.
- Plaster silikonowy należy dociąć do wielkości blizny, z uwzględnieniem 5 mm marginesu z każdej strony, np. przy bliznie o rozmiarach 0,5 x 13 cm z jednego, dużego opakowania można uzyskać 30 mniejszych plastrów.
- Plastry silikonowe na blizny Sutricon Kids można nosić przez całą dobę. Jednak przynajmniej raz na dobę należy je zdjąć, bliznę umyć neutralnym mydłem, wysuszyć i nałożyć ten sam plaster ponownie.
- Jeden plaster Sutricon Kids można nosić do 5 dni, jeśli jest zachowany w czystości oraz utrzymuje właściwości adhezyjne. Uwaga! Plastra nie należy myć ani zaklejać dodatkowym opatrunkiem.
- Jedno opakowanie wystarcza na 1-3 miesiące terapii, w zależności od wielkości i rodzaju blizny.
- Ważną kwestią jest czas terapii, czyli jak długo należy stosować plastry Sutricon Kids. Efekty można zaobserwować już po miesiącu, jednak pełna kuracja jest dłuższa i zależy od wielu czynników indywidualnych. Najważniejsze to wielkość i rodzaj blizny, a także uwarunkowania genetyczne. Blizny najszybciej goją się u dzieci, natomiast u osób starszych czas potrzebny na pełną regenerację skóry jest najdłuższy. Aby osiągnąć zadowalające efekty, należy stosować preparat regularnie i postępować zgodnie z instrukcją używania.
- Długość terapii to średnio:

min. 3 miesiące w przypadku blizn świeżych,

min. 6 miesięcy w przypadku blizn starszych.

- Przy skłonnościach do nieprawidłowego bliznowacenia, np. keloidów czy bliznowców zaleca się stosowanie plastrów Sutricon Kids przez cały okres przebudowy blizny, nawet do 1 roku.

Producent

Verco S.A.

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 5, lok. 6U

01-015 Warszawa