

SUTRICON Plastry silikonowe 5 sztuk

Cena: 72,02 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	SUTRICON
Opakowanie	5 sztuk
Postać	Plastry
Producent	VERCO
Przeznaczenie	Redukcja blizn, Regenerujące (odbudowujące), Rozjaśniające, Wygładzające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Silikonowe plastry Sutricon to innowacyjne rozwiązanie medyczne, przeznaczone do redukcji widoczności zarówno świeżych, jak i dojrzałych blizn. Plastry skutecznie poprawiają wygląd i elastyczność blizn, rozjaśniają oraz wygładzają powierzchnię skóry, jednocześnie zmniejszając widoczność blizn. Dzięki swoim właściwościom, plastry silikonowe na blizny utrzymują odpowiedni poziom wilgotności w tkance bliznowatej. Dodatkowo, łagodzą nieprzyjemne doznania związane z procesem gojenia blizny, takie jak ból, swędzenie czy uczucie napięcia.

Składniki

Żel silikonowy, elastyczna membrana poliuretanowa.

Stosowanie

1. Silikonowe plastry Sutricon można stosować po całkowitym zagojeniu rany i po zdjęciu szwów.
2. Przed użyciem należy dokładnie oczyścić i osuszyć bliznę.
3. W celu dopasowania wielkości plastra do powierzchni blizny, możliwe jest jego docięcie w dowolny sposób.
4. Plaster należy zmieniać średnio co 3 do 5 dni, jednak najlepsze efekty uzyskuje się wymieniając plaster co 24 godziny. Plaster należy dociąć do wielkości blizny, z uwzględnieniem 5 mm marginesu z każdej strony. Najlepszy efekt uzyskuje się przy ciągłym noszeniu plastra przez 24 godziny. Nie należy używać tego samego plastra przez więcej niż 7 dni.

Zastosowanie

- Podczas leczenia różnych rodzajów blizn, w tym pooperacyjnych, poparzeniowych, pourazowych i innych.
- W zapobieganiu nieprawidłowemu bliznowaceniu.



- W zmniejszaniu widoczności blizn świeżych i dojrzałych.
- Dla dzieci (już od 6. miesiąca życia) i dorosłych.

Przeciwwskazania

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/uczulenia na którykolwiek ze składników.
- Nie stosować po upływie terminu ważności wyrobu medycznego.
- Nie stosować jeśli opakowanie jest uszkodzone.
- Plastry wyłącznie do użytku zewnętrznego, miejscowo na skórę.
- Nie stosować na otwarte, niezagojone rany, uszkodzoną skórę, rany sączące, błony śluzowe, oparzenia.
- Nie stosuj jeśli w okolicach blizny występują odczyny alergiczne lub inne zmiany chorobowe.
- Unikaj kontaktu z oczami.

Ostrzeżenia

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Dodatkowe informacje

5 x plaster silikonowy 3 cm x 10 cm

Producent

Verco S.A.
ul. Skwer Wyszyńskiego 5 lok. 6U
01-015 Warszawa