

SutriSept Płyn 250 ml



Cena: 49,64 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	250 ml
Postać	Spray
Producent	VERCO
Przeznaczenie	Antyseptyczne, Nawilżające, Oczyszczające, Ułatwiające gojenie
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

SutriSept to nowoczesny płyn do antyseptycznego oczyszczania i przemywania ran oraz oparzeń 1 i 2 stopnia. Działa bezbolesnie, usuwając zanieczyszczenia z uszkodzonej skóry, co pomaga zapobiegać infekcjom i przyspiesza proces gojenia się ran i oparzeń. Formuła płynu jest także odpowiednia do antyseptycznego oczyszczania, zmiękczenia i usuwania wyschniętych materiałów opatrunkowych, bez ryzyka dodatkowego uszkodzenia rany.

Składniki

PHMB (Poliheksanid) 0,1%, poloksamer 188 1%

Zastosowanie

SutriSept płyn z atomizerem, 250 ml przeznaczony jest do:

- do antyseptycznego oczyszczania ran i oparzeń,
- irygacji i nawilżania ran,
- nawilżania opatrunków medycznych przed założeniem,
- nawilżania i dekontaminacji opatrunków przed usunięciem z rany,
- eliminacji patogennych mikroorganizmów z opatrunków.

Sposób użycia

Instrukcja oczyszczania rany:

- dokładnie oczyścić całą ranę i jej okolice produktem SutriSept Płyn na rany
- rany głębokie z rozległą martwicą tkanek przemywać przez 10-15 minut (przez nałożenie mokrego opatrunku)
- w celu optymalnego oczyszczenia rany zaleca się jej moczenie przez co najmniej 15 minut za pomocą całkowicie zmoczonego kompresu
- nie należy rozcieńczać płynu

Stosowanie na opatrunki i bandaże:

- całkowicie namoczyć opatrunki i bandaże, które przywarły do powierzchni rany, płynem i odczekać 1 - 5 minut, aby zmiękły, po czym ostrożnie usunąć je z rany

Przeciwwskazania

- Produkt nie jest odpowiedni do stosowania w przypadku operacji chrząstek hialinowych i aseptycznych operacji stawów, w uchu środkowym i wewnętrznym, nie można go również aplikować do oczu. W przypadku kontaktu płynu z aseptyczną chiząstką należy rt natychmiast przemyć roztworem Ringera lub fizjologicznym roztworem soli.
- Nie stosować jeżeli u pacjenta rozpoznano lub podejrzewa się nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu.
- Nie stosować w obrębie ośrodkowego układu nerwowego i opon mózgowych.
- Nie stosować razem z anionowymi środkami powierzchniowo czynnymi, mydłami, olejkami, enzymami itp. Substancje te należy dokładnie usunąć z powierzchni rany przed zastosowaniem produktu.
- Nie stosować do płukania i przemywania otrzewnej.

Ostrzeżenia

- Wyłącznie do użytku zewnętrznego na skórę.
- Produktu nie wolno podawać we wlewach dożylnych ani iniekcjach.
- Produktu nie stosować u pacjentów z nadwrażliwością na którykolwiek z jego składników.
- Produktu nie wolno pić! Produktu nie wolno połykać!
- SutriSept Płyn na rany jest produktem gotowym do użycia.
- Produkt można podgrzać przez użyciem do temperatury ciała.

Producent

VercO S.A.
ul. Skwer Wyszyńskiego 5 lok. 6U
01-015 Warszawa