

SutriSept, płyn na rany, 50 ml



Cena: 37,59 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	50 ml
Postać	Spray
Producent	VERCO
Przeznaczenie	Antyseptyczne, Dezynfekujące, Nawilżające, Oczyszczające, odkażające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

SutriSept to wyrób medyczny w postaci płynu z atomizerem do stosowania na rany. Stanowi pierwszą pomoc na rany, zapobiega ich zakażeniu, bezboleśnie oczyszcza i przyspiesza gojenie. Posiada objętość 50 ml. Jest odpowiedni dla dzieci od 3. roku życia, nie brudzi i może być stosowany długotrwale.

Wskazania

- Oczyszczanie ran i skóry (w tym powstałe w wyniku urazów - przecięcia, rozdrarcia, otarcia, zmiżdżenia, ugryzienia, użądlenia, a także rany chirurgiczne)
- Oczyszczanie skóry w okolicy stomii, przetok i ropni oraz miejsc wprowadzenia cewników urologicznych
- Irygacja ran,
- Nawilżanie ran,
- Dezynfekcja materiałów medycznych (opatrunki, bandaże, gaza itp.),
- Izolacja powierzchni rany od środowiska zewnętrznego,
- Zapobieganie tworzeniu się biofilmu bakteryjnego,
- Eliminacja patogennych mikroorganizmów z opatrunku.

Działanie

SutriSept Płyn na rany przeznaczony jest do oczyszczania, irygacji oraz nawilżania ran i oparzeń 1. i 2. stopnia. Dzięki unikalnej kompozycji składników działa oczyszczająco oraz przyspiesza gojenie rany. Płyn izoluje powierzchnię rany od środowiska zewnętrznego, tworząc powłokę ochronną. Przeciwdrobnoustrojowe właściwości płynu zapobiegają tworzeniu się biofilmu bakteryjnego. Płyn powoduje także trwały efekt nawilżenia. Utrzymanie czystości i wilgotności rany zapewnia stabilne środowisko w ranie.

Oprócz oczyszczania rany produkt może być także stosowany w celu ułatwienia zmiany materiałów medycznych, takich jak opatrunki, bandaże itp. Zwilżenie płynem materiałów medycznych, które wyschły i przywarły do rany, ułatwia ich usunięcie.



Skład

- Biguanid poliaminopropylu (poliheksanid) 0.1% i substancje pomocnicze.
- Bezbarwny, przezroczysty i niemal bezzapachowy płyn wodny.

Sposób użycia

Instrukcja oczyszczania rany:

- dokładnie oczyścić całą ranę i jej okolice produktem Sutrisept Płyn na rany
- rany głębokie z rozległą martwicą tkanek przemywać przez 10-15 minut (przez nałożenie mokrego opatrunku)
- w celu optymalnego oczyszczenia rany zaleca się jej moczenie przez co najmniej 15 minut za pomocą całkowicie zmoczonego kompresu
- nie należy rozcieńczać płynu

Stosowanie na opatrunki i bandaże:

- całkowicie namoczyć opatrunki i bandaże, które przywarły do powierzchni rany, płynem i odczekać 1 - 5 minut, aby zmiękły, po czym ostrożnie usunąć je z rany

Przeciwwskazania

- Produkt nie jest odpowiedni do stosowania w przypadku operacji chrząstek hialinowych i aseptycznych operacji stawów, w uchu środkowym i wewnętrznym, nie można go również aplikować do oczu. W przypadku kontaktu płynu z aseptyczną chiząstką należy natychmiast przemyć roztworem Ringera lub fizjologicznym roztworem soli.
- Nie stosować jeżeli u pacjenta rozpoznano lub podejrzewa się nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu.
- Nie stosować w obrębie ośrodkowego układu nerwowego i opon mózgowych.
- Nie stosować razem z anionowymi środkami powierzchniowo czynnymi, mydłami, kremami, olejkami, enzymami itp. Substancje te należy dokładnie usunąć z powierzchni rany przed zastosowaniem produktu.
- Nie stosować do płukania i przemywania otrzewnej.

Uwagi

- Okres ważności produktu przechowywanego w temperaturze pokojowej poniżej 25°C wynosi 3 lata.
- Po otwarciu należy użyć produkt w ciągu 8 tygodni - zawiera substancje konserwujące.
- Chronić przed słońcem.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Producent

Verco S.A.
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 5, lok. 6U
01-015 Warszawa
biuro@verco.com.pl