

# Systane Ultra, nawilżające krople do oczu, 10 ml

Cena: 52,83 zł



## Opis słownikowy

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Dla kogo        | Dla kobiet, Dla mężczyzn    |
| Marka           | SYSTANE                     |
| Opakowanie      | 10 ml                       |
| Postać          | Krople do oczu              |
| Producent       | ALCON LABORATORIES          |
| Przeznaczenie   | Nawilżające                 |
| Rodzaj produktu | Wyrób medyczny              |
| Wiek            | Dla dorosłych, Dla seniorów |

## Opis produktu

### Opis

Nawilżające krople do oczu służą do łagodzenia objawów suchego oka, przynosząc czasową ulgę w pieczeniu i podrażnieniu spowodowanym suchością. Mogą być również stosowane do nawilżania oraz przywracania wilgoci soczewkom kontaktowym z hydrożelu silikonowego i miękkim (hydrofilnym) soczewkom kontaktowym, zarówno do noszenia dziennego, przedłużonego, jak i jednorazowego. Krople te nawilżają soczewki kontaktowe, zmniejszają dyskomfort związany z ich noszeniem i pomagają usuwać cząsteczki stałe, które mogą powodować podrażnienie i/lub dyskomfort.

### Składniki

Glikol polietylenowy 400, glikol propylenowy, guar hydroksypropylowy, sorbitol, aminometylopropanol, kwas borowy, chlorek potasu, chlorek sodu i środek konserwujący POLQUAD (chlorek polidronium) 0,001%.

### Zastosowanie

Uczucia suchości, podrażnienia, pieczenia, kłucia, uczucia piasku lub ciała obcego spowodowanych czynnikami środowiskowymi takimi jak kurz, dym, ozon, promieniowanie UV, suche ciepło, klimatyzacja, wiatr, przeciągi, kosmetyki albo zmniejszenie częstotliwości mrugania spowodowane długotrwałym oglądaniem telewizji lub wyłożoną pracą przy ekranie komputera

### Sposób użycia

- Wprowadzić 1-2 krople do oka, następnie pomruć.
- Można stosować o dowolnej porze dnia, zależnie od potrzeby.
- Nadają się do stosowania przed założeniem lub po zdjęciu soczewek kontaktowych.

### Przeciwwskazania

Uczulenie na którykolwiek składnik preparatu.

### Ważne wskazówki



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.  
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna  
+48 500 623 943

- Aby uniknąć zakażenia, nigdy nie należy dotykać żadnej powierzchni końcówką zakraplacza buteleczki.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Niezużyte krople wyrzucić po upływie 6 miesięcy od pierwszego otwarcia.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

**Producent**

ALCON LABORATORIES INC