

# Systane Ultra Ud krople do oczu 30minims.a0,7



Cena: 53,98 zł

## Opis słownikowy

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Dla kogo        | Dla kobiet, Dla mężczyzn    |
| Marka           | SYSTANE                     |
| Opakowanie      | 30 minims.a 0,7ml           |
| Postać          | Krople do oczu              |
| Producent       | ALCON LABORATORIES          |
| Przeznaczenie   | , Łagodzące, Nawilżające    |
| Rodzaj produktu | Wyrób medyczny              |
| Wiek            | Dla dorosłych, Dla seniorów |

## Opis produktu

### Opis

Nawilżające krople do oczu są przeznaczone do łagodzenia objawów suchego oka, zapewniając chwilową ulgę w przypadku pieczenia i podrażnienia wynikającego z suchości oka. Mogą być stosowane do nawilżania lub przywracania wilgotności soczewek kontaktowych, zarówno twardych z hydrożelu krzemionkowego, jak i miękkich (hydrofilnych) soczewek kontaktowych, niezależnie od ich rodzaju i przeznaczenia (dziennego, przedłużonego noszenia, jednorazowego). Te krople nawilżają soczewki kontaktowe, redukując dyskomfort związany z ich noszeniem, a także wspomagają usuwanie cząsteczek stałych, które mogą powodować podrażnienia lub dyskomfort.

### Składniki

Glikol polietylenowy 400, glikol propylenowy, guar hydroksypropylowy, sorbitol, aminometylopropanol, kwas borowy, chlorek potasu, chlorek sodu i środek konserwujący POLQUAD (chlorek polidronium) 0,001%.

### Zastosowanie

Uczucia suchości, podrażnienia, pieczenia, kłucia, uczucia piasku lub ciała obcego spowodowanych czynnikami środowiskowymi takimi jak kurz, dym, ozon, promieniowanie UV, suche ciepło, klimatyzacja, wiatr, przeciągi, kosmetyki albo zmniejszenie częstotliwości mrugania spowodowane długotrwałym oglądaniem telewizji lub wytężoną pracą przy ekranie komputera.

### Sposób użycia

- Wprowadzić 1-2 krople do oka, następnie pomrużyć.
- Można stosować o dowolnej porze dnia, zależnie od potrzeby.
- Nadają się do stosowania przed założeniem lub po zdjęciu soczewek kontaktowych.

### Przeciwwskazania

- Nie stosować w przypadku wrażliwości na dowolny składnik produktu.
- Nie stosować, jeśli produkt zmieni kolor lub zmętnieje.



- Nie dotykać końcówką pojemnika żadnej powierzchni, aby uniknąć zanieczyszczenia po każdym użyciu nałożyć nakrętkę.

#### Ostrzeżenia

- W przypadku wystąpienia bólu oczu, zmian w widzeniu utrzymującego się ponad 72h należy zaprzestać stosowania i skontaktować się z lekarzem.
- Po otwarciu można stosować przez 6 miesięcy.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

#### Producent

Alcon Polska Sp. z o.o.  
ul. Marynarska 15,  
02-674 Warszawa.