

Tantum Rosa, irygator do higieny intymnej, 500 ml

Cena: 31,50 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet
Opakowanie	1 sztuka
Postać	irygator
Producent	ANGELINI PHARMA POLSKA SP. Z O.O.
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny, Akcesoria
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Irygator Tantum Rosa to praktyczny pojemnik z aplikatorem przeznaczony do płukania pochwy i dbania o higienę intymną. Ten irygator o pojemności 500 ml jest wyrobem medycznym wielokrotnego użytku, stworzonym do indywidualnego stosowania przez jedną kobietę. Wykonany z elastycznego i gładkiego plastiku, irygator jest całkowicie bezpieczny przy używaniu zgodnym z jego przeznaczeniem.

Zastosowanie

Do wykonywania zabiegów płukania pochwy, w tym w szczególności:

- do podmywania i zachowania odpowiedniej higieny okolic intymnych,
- jako wspomaganie leczenia grzybicy pochwy,
- podczas infekcji intymnych w ciąży,
- na pieczenie pochwy,
- jako przygotowanie do zabiegów ginekologicznych jak i po jego wykonaniu.

Sposób użycia

- Płyn do irygacji należy przygotować używając wody o temperaturze ciała.
- Następnie napełnić zbiornik przygotowanym roztworem w ilości 500 ml.
- Na zbiornik nakręcić końcówkę irygatora (aplikator).
- Ostrożnie wprowadzić końcówkę irygatora (aplikator) do pochwy, najgłębiej jak jest to możliwe.
- Zbiornik należy trzymać dwoma rękoma, kciuki należy ułożyć na korku przy końcówce irygatora (aplikatorze).
- Naciskając zbiornik doprowadzić do jego opróżnienia.
- Jeżeli jest to możliwe irygację należy wykonać w pozycji leżącej (najlepiej w pustej wannie) lub stojącej (np. pod prysznicem).
- Dla bezpieczeństwa i wygody zaleca się wykonanie irygacji w bezpiecznej i stabilnej pozycji, z ewentualnym wykorzystaniem wkładki antypoślizgowej.
- Można również wykonać irygację w pozycji siedzącej – na bidecie lub sedesie.
- Delikatnie wyjąć końcówkę irygatora (aplikator) z pochwy nie dopuszczając do rozprężenia się zbiornika, aby nie wsysać do

zbiornika wydzielin z pochwy.

- Ze zbiornika odkręcić końcówkę irygatora (aplikator).
- Obie części umyć w ciepłej (do 40°C) wodzie i odstawić do osuszenia.

Ostrzeżenia

- Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji używania i etykietą bądź skonsultuj się z lekarzem, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.
- Kobiety, które nie rozpoczęły życia seksualnego nie powinny stosować irygatora do higieny intymnej Tantum Rosa®, 500 ml, gdyż jego użycie może spowodować przerwanie błony dziewiczej.

Ważne wskazówki

- Irygator dopochwowy jest przeznaczony do użytku indywidualnego.
- Żadnej części irygatora nie należy myć w zmywarce.
- Nie sterylizować.
- Nie podgrzewać powyżej 40°C.
- Nie stosować żrących środków do dezynfekcji.
- W razie wątpliwości co do sposobu użycia należy skontaktować się z lekarzem.

Producent

Pentaferte Italia S.r.l.
Viale Piane Nocella 23
64012 Campli (TE), Włochy