

Termcool żel 30 g

Cena: 21,17 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	TERMCOOL
Opakowanie	30 g (tub.)
Postać	Żel
Producent	ICN POLFA RZESZÓW S.A.
Przeznaczenie	, Oparzenie
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Termcool to produkt o miejscowym działaniu, który zapewnia natychmiastowe uczucie chłodzenia, zwłaszcza gdy jest stosowany bezpośrednio po oparzeniu. Dzięki temu zmniejsza się odczuwanie bólu w obszarze oparzenia.

Składniki

Aqua, alcohol, menthol, benzyl alcohol (and) methyl 4-hydroxybenzoate (and) propyl-4-hydroxybenzoate, carbomer, sodium hydroxide.

Zastosowanie

Oparzenia I stopnia spowodowane płomieniem, wrzątkiem lub parą, a także powstałe na skutek nadmiernego opalania i korzystania z solarium.

Sposób użycia

- Na oparzoną skórę nałożyć możliwie szybko warstwę żelu o grubości 2-3 mm.
- W razie potrzeby zaleca się usunięcie pozostałości nałożonego wcześniej żelu i naniesienie kolejnej warstwy.
- Gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja należy zgłosić się do lekarza.
- Po każdorazowym użyciu szczelnie zamknąć opakowanie.

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na składniki preparatu.
- Nie stosować preparatu w przypadku pojawienia się ran lub pęcherzy.
- Unikać kontaktu żelu z oczami i błonami śluzowymi.
- Nie należy stosować preparatu u dzieci do 36 miesiąca życia.
- Tylko do użytku zewnętrznego.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

- Nie używać jeżeli opakowanie jest uszkodzone.
- Przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze powyżej 8oC.