

Termofor PCV 2l z pokrowcem dzianina, 1 sztuka

Cena: 30,07 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Termofor
Producent	SILESIA PHARMA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Mięśnie i stawy
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny, Akcesoria
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Termofor medyczny o pojemności 2 litrów, wykonany z PCV, w zestawie z miękkim pokrowcem dzianinowym. Produkt stosowany jako okład miejscowy, skutecznie pomaga w łagodzeniu różnorodnych dolegliwości bólowych oraz wspiera rozluźnienie napiętych mięśni.

Wskazania

Produkt stosowany jako okład do: miejscowego ogrzewania ciała, łagodzenia różnego rodzaju dolegliwości bólowych i rozluźniania mięśni.

Działanie

- Miejscowo ogrzewa ciało
- Wspomaga łagodzenie dolegliwości bólowych
- Rozluźnia napięte mięśnie
- Z pokrowcem dzianina

Sposób użycia

1. Termofor napełnij wodą o temperaturze ok 50°C do 2/3 objętości - napełniając termofor wodą należy trzymać go w pozycji pionowej, trzymając za otwór wlewu (można stosować lejek). Stosowanie wody o temperaturze powyżej 70°C będzie skracało żywotność wyrobu i zwiększa ryzyko uszkodzenia termoforu w czasie jego użytkowania, co może spowodować oparzenie użytkownika.
2. Po napełnieniu wodą usuń nadmiar powietrza z termoforu, przechylając go delikatnie aż do momentu gdy pojawi się woda przy otworze wlewu.
3. Następnie mocno zakręć wlew korkiem - sprawdź jego szczelność poprzez odwrócenie termoforu korkiem do dołu i obserwację przez chwilę czy nie pojawia się woda.
4. Termofor jest gotowy do użycia.
5. Po użyciu odkręć korek, wylej wodę i pozostaw w pozycji pionowej (otworem wlewowym do dołu) do całkowitego wyschnięcia.

Przeciwwskazania



- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/uczulenia na którykolwiek ze składników.
- Nie stosować jeśli opakowanie jest uszkodzone.

Ostrzeżenia

1. Kontroluj wyrób pod kątem zużycia i ewentualnych uszkodzeń.
2. Sprawdź szczelność przed każdym użyciem. Nie używaj wrzącej wody – gorący termoform może spowodować oparzenia.
3. Nie obciążaj nadmiernie termoformu np. poprzez siadanie na nim – grozi to pęknięciem termoformu.
4. Unikaj bezpośredniego, przedłużonego kontaktu ze skórą - używaj w pokrowcu.
5. Nie wkładaj wyrobu do kuchenki mikrofalowej.

Producent

MIMIC Poland Spółka z o.o.
ul. Gimnazjalna 2A
85-007 Bydgoszcz