

Termometr Dr.Check, FC500, bezdotykowy na podczerwień, 1 sztuka



Cena: 150,43 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	DIAGNOSIS
Opakowanie	1 sztuka
Postać	termometr
Producent	DIAGNOSIS S.A.
Przeznaczenie	Gorączka
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Dr. Check FC500 to medyczny termometr na podczerwień, pozwalający na bezdotykowy pomiar temperatury ciała i otoczenia.

Działanie

Urządzenie wykorzystuje podczerwień do dokonania pomiaru temperatury bez potrzeby dotykania obiektu. Pomiar wykonywany jest w kilka sekund.

Stosowanie

Pomiar temperatury ciała:

1. Włącz urządzenie.
2. Za pomocą przełącznika trybu pracy umieszczonego po boku termometru zmień tryb pracy na pomiar temperatury ciała.
3. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego wyceluj czujnikiem w stronę czoła. Zachowaj odległość nie większą niż 5 cm.
4. Naciśnij przycisk START i powoli przesuwaj termometr w stronę skroni (około 1 cm nad brwiami).
5. Po 3 sekundach rozlegnie się sygnał dźwiękowy sygnalizujący zakończenie pomiaru.
6. Zmierzona temperatura automatycznie wyświetli się na wyświetlaczu.

Pomiar temperatury obiektu:

1. Włącz urządzenie.
2. Za pomocą przełącznika trybu pracy umieszczonego po boku termometru zmień tryb pracy na pomiar temperatury obiektu.
3. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego wyceluj czujnikiem w stronę obiektu, którego temperatura ma zostać zmierzona. Zachowaj odległość nie większą niż 5 cm.
4. Naciśnij przycisk START.
5. Po 3 sekundach rozlegnie się sygnał dźwiękowy sygnalizujący zakończenie pomiaru.



6. Zmierzona temperatura automatycznie wyświetli się na wyświetlaczu.

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony jest do wykonywania pomiarów temperatury ciała zarówno dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. Może on także służyć do pomiarów temperatury otoczenia, obiektów i wody i pokarmów.

Przeciwwskazania

- Nie należy wykonywać pomiarów temperatury u dziecka w trakcie karmienia lub bezpośrednio po jego zakończeniu.
- Nie należy jeść, pić ani wykonywać ćwiczeń przed pomiarem temperatury lub w jego trakcie.

Właściwości

Termometr Dr. Check FC500 posiada wbudowany alarm gorączki, który za pomocą czerwonego światła i 10 krótkich sygnałów dźwiękowych informuje o temperaturze ciała powyżej 37,5°C. Pomiar dokonywany jest w ciągu kilku sekund a wbudowana pamięć umożliwia wyświetlenie 30 ostatnich wartości.

Ostrzeżenia

- Zarówno pacjent, jak i termometr powinni znajdować się w tym samym zamkniętym pomieszczeniu, w tej samej temperaturze otoczenia przez minimum 30 minut przed wykonaniem pomiaru.
- Temperaturę należy mierzyć zawsze w tym samym miejscu i w tych samych warunkach.
- W przypadku noworodków oraz niemowląt w wieku do 6 miesięcy lekarze zalecają pomiar temperatury w odbycie. Pozostałe metody pomiaru mogą dawać niejednoznaczne wyniki. W przypadku stosowania termometru bezdotykowego u noworodków lub niemowląt zalecamy zweryfikowanie wyniku pomiaru poprzez pomiar temperatury w odbycie.
- Zaleca się trzykrotne wykonanie pomiaru i przyjęcie za wiarygodny najwyższego wyniku w przypadku dzieci poniżej 3 roku życia z obniżoną odpornością, gdy zmierzona temperatura jest zaskakująco niska lub gdy urządzenie jest używane po raz pierwszy.

Producent

DIAGNOSIS S.A.
Gen. W. Andersa 38A
15-113 Białystok