

Test ciążowy płytkowy BOBO EZ HCG - 1 sztuka

Cena: 7,21 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet
Opakowanie	1 sztuka
Postać	test
Producent	DIAGNOSIS S.A.
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny, Akcesoria
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Bobo-Test Płytkowy to szybki i prosty test ciążowy do użytku domowego, który pokazuje wyniki w ciągu 3-5 minut od wykonania. Można go użyć już po 10 dniach od stosunku, korzystając z moczu pobranego o dowolnej porze dnia. Test wykrywa obecność ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG) – hormonu produkowanego przez rozwijające się łożysko zaraz po zapłodnieniu, który jest wydalany z moczem. Zawarte w teście przeciwciała reagują specyficznie z hCG, co umożliwia wykrycie nawet niewielkich ilości tego hormonu, pomagając potwierdzić lub wykluczyć ciążę.

Zastosowanie

Wykrywanie wzrostu poziomu hormonu hCG w moczu we wstępnej diagnostyce ciąży.

Sposób użycia

- Przed rozpoczęciem wykonywania testu uważnie przeczytaj instrukcję użycia.
- Do przeprowadzenia testu potrzebny będzie zegarek lub stoper oraz czysty, suchy, plastikowy lub szklany pojemnik do zbierania moczu (pojemnik nie wchodzi w skład zestawu).
- Zanim przeprowadzisz test, zbierz próbkę moczu do czystego, suchego pojemnika ze szkła lub plastiku.
- Wyjmij foliową torebkę z opakowania testu.
- Rozerwij torebkę wzdłuż nacięcia i wyjmij płytkę testową i pipetkę.
- Zanurz końcówkę pipetki w pojemniku z próbką moczu.
- Ściskając szeroką część pipetki, nabierz próbkę moczu.
- Trzymając pipetkę z próbką moczu pionowo nad okienkiem SAMPLE (S) umieść w nim 3-4 krople moczu.
- Uważaj, aby nie wytworzyły się pęcherzyki powietrza.
- Po 3-5 minutach odczytaj wynik, a następnie wyrzuć test.

Ostrzeżenia

- Wewnątrz torebki foliowej znajduje się pochłaniacz wilgoci, który służy wyłącznie w celu zabezpieczenia testu w czasie

przechowywania i nie jest stosowany w badaniu.

- Tylko do użytku zewnętrznego.
- Nie połykać.
- Nie używać jeżeli opakowanie zostało uszkodzone.

Ważne wskazówki

- Nie otwieraj foliowej torebki testu jeżeli nie jesteś gotowa do przeprowadzenia testu.
- Nie używaj testu jeżeli minęła data jego przydatności do użycia (data przydatności jest wydrukowana na opakowaniu i etykiecie).
- Test wyłącznie do diagnostyki in vitro (stosować tylko do użytku zewnętrznego).
- Test należy przechowywać w temperaturze od 15-30°C, z dala od światła słonecznego.
- Nie wolno zamrażać testu.
- Jeżeli nie możesz wykonać testu tuż po pobraniu próbki moczu, możesz próbkę przechować przez 3 dni w temperaturze 2-8°C (np. w lodówce).
- Przed wykonaniem testu próbka powinna przebywać ok. pół godziny w temperaturze pokojowej.
- Test należy przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
- Test może być używany tylko raz. Wyrzucić po użyciu.
- Po wykonaniu testu nie należy podejmować żadnych działań o charakterze medycznym bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

Producent

Diagnosis S.A.
ul. Gen. W. Andersa 38A
15-113 Białystok