

Test Combo Grypa A/B + COVID-19, 1 sztuka

Cena: 14,27 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	test
Producent	FARMABOL SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Diagnostyczne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Test Combo Grypa A/B + COVID-19 służy jako wsparcie w wykrywaniu infekcji wywołanych wirusami grypy typu A i B, RSV oraz SARS-CoV-2.

Sposób użycia

- Zedrzyć uszczelkę buforu lizującego i umieścić ją na statywie na probówce.
- Włożyć wymazówkę do nozdrza (patyczek z końcówką wchłaniającą) (2,5 cm). Pamiętać o zebraniu całej wydzieliny, jaka może być obecna w jamie nosowej.

Powoli obrócić wymazówkę po wewnętrznej ścianie nosa co najmniej 5 razy. Używając tej samej wymazówki powtórzyć czynności w drugim nozdrzu.

- Włożyć wymazówkę do próbki na próbkę i odcisnąć ją po wewnętrznej ścianie próbki, obracając ją ok. 10 razy.
- Wycisnąć wymazówkę o ściankę próbki 5 razy. Podnieść wymazówkę powyżej poziomu roztworu buforowego i wycisnąć ją o zewnętrzną ściankę próbki jeden raz, aby pozostawić jak największą próbkę w próbce.
- Przełamać wymazówkę i pokryć ją zawartością zakraplacza.
- Dodaj 4 krople przetworzonego ekstraktu próbki do otworu na próbkę.
- Odczytaj wynik w ciągu 15-20 minut. Uwaga! Wynik zaobserwowany po 20 minutach jest nieprawidłowy.

Ostrzeżenia

- Test ten jest przeznaczony do samodzielnego wykonania przez pacjentów.
- Niniejszy zestaw przeznaczony jest wyłącznie do diagnostyki in vitro.
- Zestaw ten jest przeznaczony dla osób w wieku 18 lat lub starszych.
- Przed rozpoczęciem testu doprowadzić zawartość zestawu do temperatury pokojowej.
- Podczas testu należy stosować odpowiednią ochronę, aby uniknąć rozpryskiwania podczas podawania próbki.
- Jeżeli uzyskano pozytywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2, występuje podejrzenie infekcją COVID-19, w takim przypadku



należy niezwłocznie nawiązać kontakt lekarzem /lekarzem rodzinnym lub lokalną placówką służby zdrowia, działać zgodnie z określonymi lokalnymi wytycznymi w zakresie samoizolacji, należy również wykonać test PCR celem potwierdzenia.

- Jeżeli uzyskano pozytywny wynik testu w kierunku grypy A/B jest pozytywny: Występuje podejrzenie infekcją grypą A/B, w takim przypadku następne czynności należy wykonać zgodnie z lokalnymi wytycznymi grypą B, w szczególności u osób, które miały kontakt z wirusem.
- Nie używać ponownie zestawu testowego.
- W przypadku uszkodzenia jakichkolwiek komponentów zestawu testowego, nie należy go używać.
- Nie używaj tego zestawu po upływie terminu ważności wydrukowanego na zewnętrznym opakowaniu kartonowym.
- Podczas pobierania próbki wymazu z przedniej części jamy nosowej należy używać wyłącznie wymazówki dostarczonej w zestawie.

Producent
SEVEN VICTORIA