

Test do wykrywania w moczu, Narkodiag Multi Test, 1 sztuka

Cena: 27,25 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	test
Producent	DIAGNOSIS S.A.
Przeznaczenie	Diagnostyczne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży

Opis produktu

Opis

Test do wykrywania obecności substancji psychoaktywnych w moczu, służący do szybkiej i skutecznej identyfikacji narkotyków. Umożliwia ocenę obecności niepożądanych związków w organizmie poprzez analizę próbki moczu.

Działanie

- Amfetamina jest substancją chemiczną występującą w postaci tabletek, kapsułek, białego proszku lub kryształków. Narkotyk ten jest często przyjmowany poprzez inhalację nosową lub spożycie.
- Ecstasy jest syntetycznym analogiem amfetaminy i meskaliny wykazującym działanie stymulujące na układ nerwowy (podobnie jak amfetamina) a także posiada właściwości psychodeliczne (podobnie jak meskalina).
- Tetrahydrokannabinol (THC), jest głównym metabolitem marihuany i haszyszu wykrywanym w moczu wkrótce po zażyciu tych narkotyków. Najczęstszym sposobem zażywania marihuany, haszyszu oraz ziela konopii jest palenie.
- Opiaty - morfina, heroina. Do grupy opiatów zalicza się wszelkie narkotyki pochodzące z maku, w tym związki występujące naturalnie, takie jak morfina i kodeina oraz narkotyki pół-syntetyczne, takie jak heroina.

Sposób użycia

Należy pobrać próbkę moczu do czystego i suchego pojemnika. Następnie zanurzyć panel testowy w próbce moczu i odczytać wynik po 5 minutach. Wynik wyświetlany jest jako barwne linie na pasku testowym.

Ostrzeżenia

- Uważnie przeczytaj instrukcje użycia.
- Nie używaj testu jeżeli minęła data jego przydatności do użycia (data przydatności jest wydrukowana na opakowaniu i etykiecie).
- Test należy przechowywać w temperaturze od 2°C do 30°C, z dala od światła słonecznego.
- Nie należy zamrażać zestawu testowego.
- Test należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Test powinien pozostać w zapieczętowanej torebce aż do momentu użycia.
- Wszelkie próbki należy uznać za potencjalnie biologicznie niebezpieczne i traktowane tak jak środki zakaźne.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

- Wszystkie elementy zużytego testu należy włożyć do oryginalnego opakowania i postępować z nimi tak jak z odpadkami.
- Nie należy używać ponownie żadnego z elementów zestawu testowego.

Producent

DIAGNOSIS S.A.
Gen. W. Andersa 38A
15-113 Białystok