

Test Fluorecare, zestaw combo antygenowy, SARS-CoV2&Grypa A/B&RSV, 1 sztuka

Cena: 10,37 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	test
Producent	SEVEN VICTORIA CHUDY
Przeznaczenie	Diagnostyczne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Test Fluorecare to jednorazowy test kasetkowy, będący wyrobem medycznym. Pozwala na wykrycie zakażenia wirusem grypy typu A, typu B, RSV oraz SARS-CoV-2. Jest przeznaczony do samodzielnego użytku w warunkach domowych.

Działanie

Działanie wyrobu opiera się na łączeniu antygenów w próbce z przeciwciałami obecnymi na płytce. Poprzez właściwości chromatografii, w przypadku obecności antygenów w materiale zachodzi reakcja, której wynikiem jest fioletowo-czerwona linia, widoczna w okienkach płytki testowej.

Przeznaczenie

Do wykrywania zakażeń koronawirusem (antygen SARS-CoV-2), wirusem grypy (typu A i typu B) oraz wirusa RSV w próbce wymazu z nosa osób z objawami.

Sposób użycia

- Odkręcić nakrętkę probówki i usunąć znajdujący się wewnątrz niebieski korek.
- Włożyć probówkę do otworu dołączonego do zestawu lub wykorzystać inne elementy w celu utrzymania jej w stabilnej pozycji pionowej.
- Wyjąć z foliowego opakowania kartę testową.
- Ostrożnie wyjąć sterylną wymazówkę
- Wprowadzić wymazówkę do lewego otworu nosowego na głębokość około 2,5 cm.
- Obrócić wymazówkę na wewnętrznej ścianie nozdrza kilka razy.
- Czynności opisane w punktach 5-6 powtórzyć w prawym nozdrzu.
- Umieścić wymazówkę w próbówce.
- Oderwać wymazówkę w węzle wymazowym i pozostawić dolną połowę w próbówce. Następnie zamknąć probówkę.

- Przycisnąć wymazówkę 10 razy w póbówce.
- Odczekać 60 sekund.
- Odkręcić zacisk u góry pokrywki.
- Nanieść po dwie krople gotowego roztworu do każdej ze studzienek znajdujących się na kasetce wyrobu (każda studzienka została opisana adekwatnie do wirusa, którego ma zadanie wykryć).
- Odczekać 15 minut.
- Odczytać wynik.

Przeciwwskazania

- Przed użyciem należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.
- Test jest jednorazowy. Nie stosować ponownie.
- Jak w przypadku każdego domowego testu, wynik należy potwierdzić wykonując powtórne badanie w specjalizującej się do tego poradni, szpitalu lub innym miejscu do tego upoważnionym. Użytkownik domowego testu nie może podejmować decyzji medycznych bez uprzedniego skonsultowania się z lekarzem, bez względu na to czy wynik jest pozytywny czy negatywny.

Uwagi

- W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić od światła i wilgoci.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
- Nie używać ponownie.
- Nie stosować, jeśli opakowanie było wcześniej otwierane lub uszkodzone.
- Nie odczytywać wyniku po 20 minutach od wykonania testu.
- Po odpakowaniu karty z testem, należy go wykonać w ciągu najbliższej godziny.

Producent

Shenzhen Microprofit Biotech Co., Ltd.
Room 1001 of Unit 2, Room 1001 and Room 1101 of Unit 1, Building 2, Hongchuang Technology Center, Xikeng Community, Fucheng Sub-district
518055 Shenzhen, Guangdong
VICKY@MICROPROFIT-BIO.COM