

Test Hemoactive, test na krew utajona w kale, 1 opakowanie (5 testów)

Cena: 14,51 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	5 sztuk
Postać	test
Producent	DIAGNOSIS S.A.
Przeznaczenie	Diagnostyczne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Test HemoActive to medyczny wyrób diagnostyczny służący do wykrywania niewidocznej gołym okiem krwi w próbce kału. Został zaprojektowany z myślą o samodzielnym użyciu w domu – jest higieniczny, precyzyjny i wyjątkowo łatwy w obsłudze. Wynik pojawia się już po 2 minutach i jest przejrzysty oraz prosty do zinterpretowania. Stanowi praktyczne narzędzie wspierające profilaktykę raka jelita grubego oraz innych schorzeń układu pokarmowego.

Działanie

Zasada działania testu opiera się na wykrywaniu hemoglobiny w ilości 2 mg na 100 ml wody.

Sposób użycia

- Zanim przystąpisz do wykonania testu, dokładnie wyczyść muszlę klozetową w celu usunięcia wszelkich chemikaliów. Na koniec kilkakrotnie spłucz wodę w toalecie.
- Otwórz opakowanie z bibułkami testowymi.
- Wyjmij jedną z bibulek testowych i wrzuć ją do toalety. Odczekaj 2 minuty.
- Jeśli woda w muszli jest czysta, bibułka nie zabarwi się. Jeśli w polu testowym bibułka pojawi się niebiesko-zielony krzyżyk, test należy wykonać ponownie po 3 dniach.
- Spłucz toaletę.
- Oddaj stolec. Pamiętaj by nie spuszczać wody w toalecie po jego oddaniu.
- Wrzuć do muszli jedną bibułkę testową. Odczekaj 2 minuty.
- Jeżeli po 2 minutach bibułka zabarwi się na kolor niebiesko-zielony oznacza to, że wynik testu jest pozytywny (obecna krew w kale). Jeżeli bibułka nie zabarwi się, oznacza to, że wynik testu jest negatywny (brak krwi w kale).
- W ciągu następnych kilku dni zaleca się przeprowadzić test dwukrotnie.
- Po przeprowadzeniu ostatniego, trzeciego testu, należy przeprowadzić test kontrolny. Aby tego dokonać należy:



-dokładnie spłukać toaletę,
-otworzyć saszetkę z proszkiem kontrolnym, po czym wsypać jej zawartość do muszli klozetowej,
-odczekać 1 min. do całkowitego rozpuszczenia proszku,
-wrzucić bibułkę do muszli,
-w ciągu 2 minut na bibułce testowej powinien pojawić się niebiesko-zielony krzyżyk, (wynik testu kontrolnego powinien być pozytywny)
informujący, że testy działały prawidłowo.

Ostrzeżenia

- Przed przystąpieniem do testu należy zapoznać się z informacją zawartą w ulotce dołączonej do opakowania.
- Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu zawartością saszetki z proszkiem kontrolnym. Jeśli dojdzie do kontaktu ze skórą lub oczami przemyć dużą ilością wody.
- Nie spożywać i nie wdychać proszku kontrolnego.
- Testu nie należy przeprowadzać podczas menstruacji, krwawienia hemoroidów oraz obstrukcji.
- Niewykorzystane bibułki testowe należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej z dala od słońca oraz wilgoci.
- Przechowywać z dala od dzieci.
- Po wykonaniu testu nie należy podejmować żadnych działań o charakterze medycznym bez uprzedniej konsultacji z lekarzem
- Nie używać przy uszkodzonym opakowaniu zawierającym bibułki testowe.
- Chronić przed wilgocią i światłem słonecznym.
- Do jednorazowego użytku.
- Tylko do użytku zewnętrznego.

Producent

DIAGNOSIS S.A.
Gen. W. Andersa 38A
15-113 Białystok