

Test Infekcje intymne, panelowy, 1 sztuka

Cena: 22,72 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet
Marka	DIATHER
Opakowanie	1 sztuka
Postać	test
Producent	DIATHER SP. Z O.O. SP.K.
Przeznaczenie	Diagnostyczne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny, Akcesoria
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Diather pH Test na Infekcje Intymne to domowy test do oceny pH pochwy, odpowiedni dla kobiet w każdym wieku. Ten wyrób medyczny umożliwia wstępną diagnostykę infekcji intymnych poprzez określenie poziomu pH pochwy, co pomaga zidentyfikować zakażenie. Zestaw Infekcje Intymne Diather zawiera test panelowy oraz wymazówkę do pobrania próbki wymazu z pochwy.

Zastosowanie

- Panelowy test diagnostyczny do określania zakresu pH pochwy w celu wstępnej identyfikacji zakażenia okolic intymnych.
- Domowy test na infekcje intymne pozwala wykryć zaburzenia w mikrośrodkowisku pochwy.
- Szybki test domowego użytku odpowiedni dla kobiet w każdym wieku.

Sposób użycia

1. Za pomocą wymazówki pobierz wymaz z pochwy i nanieś go na okienko testowe płytki.
2. Odczekaj 1 minutę.
3. Porównaj barwę na płytce testowej ze schematem interpretacji wyników dołączonym do opakowania.

pH w zakresie 3,8 - 4,4 wskazuje na prawidłowy wynik testu. Niższe, bądź wyższe pH oznacza wynik nieprawidłowy, co związane może być z infekcją intymną o podłożu bakteryjnym lub pasożytniczym - należy skonsultować się z lekarzem.

Ostrzeżenia

- U niektórych kobiet w okresie menopauzy obserwuje się podwyższenie pH pochwy (uzyskany wynik testu pH Diather będzie świadczył o zakresie nieprawidłowym, niespowodowanym infekcją intymną o podłożu bakteryjnym lub pasożytniczym).
- Uzyskane wyniki testu są zależne od przestrzegania wytycznych zawartych w instrukcji użycia.

Ważne wskazówki



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

- Przed przystąpieniem do badania trzeba koniecznie przeczytać dołączoną do testu instrukcję obsługi.
- Wyniki testu pH poza zakresem normy zaleca się skonsultować z lekarzem prowadzącym.
- Badanie należy wykonać co najmniej 15 minut po oddaniu moczu.
- Aby wynik testu był wiarygodny, powinien być wykonany dopiero po 3-4 dniach od zakończenia miesiączki.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Producent

Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd.
550 Yinhai Street
Hangzhou 310018, Chiny