

# Test Infekcje układu moczowego, 1 sztuka

Cena: 28,78 zł



## Opis słownikowy

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Dla kogo        | Dla kobiet, Dla mężczyzn    |
| Opakowanie      | 1 sztuka                    |
| Postać          | test                        |
| Producent       | DIATHER SP. Z O.O. SP.K.    |
| Przeznaczenie   | Diagnostyczne               |
| Rodzaj produktu | Wyrób medyczny              |
| Wiek            | Dla dorosłych, Dla seniorów |

## Opis produktu

### Opis

Test Infekcje układu moczowego to wyrób medyczny wykrywający 4 parametry: leukocyty, krew, azotany i białko w moczu.

### Wskazania

Zaleca się wykonanie testu w przypadku występowania uczucia parcia na pęcherz przy jednoczesnej niemożności oddania moczu lub oddawania niewielkiej ilości moczu, piekącego bólu, mętnego moczu o nieprzyjemnym zapachu, gorączki, złego samopoczucia lub bólu w okolicy lędźwiowej.

### Sposób użycia

1. Zbierz próbkę moczu do czystego i suchego pojemnika. Zaleca się pobranie próbki z środkowego strumienia pierwszej, porannej zbiórki wykonywanej po całonocnej lub minimum 4-godzinnej przerwie w oddawaniu moczu.
2. Pasek testowy zanurz w próbce na około 1-2 sekundy.
3. Po upływie 2 minut odczytaj wynik.

### Ostrzeżenia

- Nie odczytuj wyniku po upływie więcej niż 2 minut, gdyż może on być niewiarygodny.
- Przed pobraniem próbki nie należy spożywać pokarmów zawierających barwiki oraz leków zmieniających zabarwienie moczu.
- W przeddzień badania nie należy wykonywać ciężkiego wysiłku fizycznego, nie należy przyjmować także witaminy C, B2 oraz diety wysokobiałkowej.
- Kobiety nie powinny pobierać próbek w trakcie krwawienia miesięcznego, 2-3 dni przed spodziewanym okresem oraz po jego zakończeniu.

### Uwagi

Jeśli wynik dla któregoś z parametrów będzie pozytywny należy skontaktować się z lekarzem.  
Jeśli pomimo negatywnego wyniku (brak zabarwienia dla wszystkich 4 substancji) objawy są nadal odczuwalne, należy skonsultować się z lekarzem.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.  
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna  
+48 500 623 943

**Producent**

HANGZHOU AllTest Biotech Co. Ltd  
550 Yinhai Street  
Hangzhou, China