

Test krew utajona w kale, 1 sztuka



Cena: 15,14 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	test
Producent	DIATHER SP. Z O.O. SP.K.
Przeznaczenie	Diagnostyczne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Test na krew utajoną w kale (FOB) to wyrób medyczny do użytku domowego, który pozwala na diagnostykę różnych schorzeń przewodu pokarmowego.

Wskazania

Zaleca się wykonanie badania jeśli u pacjenta występują bóle żołądka, uczucie ciężkości, nagły spadek masy ciała, a także jeśli posiada predyspozycje rodzinne do występowania raka jelita grubego.

Osobom po 50 roku życia zaleca raz do roku profilaktyczne wykonywanie testu jako przesiewowe badanie w kierunku nowotworów jelita grubego.

Działanie

- Na membranie testu umieszczone zostały specyficzne przeciwciała przeciwko antygenowi ludzkiej hemoglobiny. Dzięki temu wykrywane są nawet niewielkie ilości ludzkiej krwi, które nie są widoczne makroskopowo - dokładność badania wynosi 99,1%.
- Test nie wykrywa antygenów hemoglobiny krwi zwierzęcej (wołu, świni, kurczaka, indyka, kozy, konia i królika) dzięki czemu nie jest konieczne stosowanie specjalnej diety przed jego wykonaniem.

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony jest przede wszystkim dla osób po 50 roku życia, w celach profilaktycznych oraz jako pomoc w diagnostyce chorób przewodu pokarmowego tj.: wrzodziejące zapalenie jelita grubego, inne choroby zapalne jelit, polipy oraz nowotwory jelita grubego.

Sposób użycia

1. Wypróżnij się na podkładkę do pobierania próbki dołączonej w zestawie.
2. Za pomocą aplikatora pobierz próbkę i umieść ją w pojemniku z odczynnikiem.
3. Nanieś 2 krople na okienko na próbkę S i odczekaj 5 minut.
4. Odczytaj wynik.



Uwagi

- Zamoczenie płytki, pobranie zbyt małej ilości próbki lub dodanie niewłaściwej ilości odczynnika na pole S może być przyczyną uzyskania nieprawidłowego wyniku.
- Wyniki pozytywne lub budzące niepokój należy skonsultować z lekarzem.
- W przypadku uzyskania wyniku negatywnego przy jednoczesnym występowaniu objawów ze strony układu pokarmowego należy skonsultować się z lekarzem.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Producent

HANGZHOU AllTest Biotech Co. Ltd
550 Yinhai Street
Hangzhou, China