

Test Liver-Screen, test do oceny stanu fizjologicznego wątroby, 1 sztuka

Cena: 46,90 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	LABHOME
Opakowanie	1 sztuka
Postać	test
Producent	ZBADAJSIE SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Diagnostyczne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny, Akcesoria
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

LIVER-Screen to szybki test immunodiagnostyczny przeznaczony do wykrywania podwyższonej aktywności enzymów transaminaz (ALT i AST) we krwi, co może świadczyć o uszkodzeniu wątroby. Transaminazy te są uwalniane do krwiobiegu przez wątrobę w przypadku jej uszkodzenia. Test jest zalecany w przypadku objawów sugerujących problemy z wątrobą, takich jak zmiany koloru moczu i stolca, brak apetytu, żółtaczka, obrzęk brzucha, osłabienie lub zmęczenie. Może być także wykorzystywany w profilaktyce wątroby. ALT i AST są enzymami występującymi w hepatocytach. LIVER-Screen umożliwia wykrycie znacznego wzrostu poziomu tych enzymów (powyżej 80 IU/l) we krwi pobranej z nakłucia palca. Test służy do diagnozowania i oceny stanu zdrowia wątroby. Wyniki testu należy zawsze interpretować w kontekście objawów klinicznych lub historii choroby. W przypadku wyników poza normą zaleca się konsultację z lekarzem w celu dalszej diagnostyki lub leczenia.

Zastosowanie

- Badanie podwyższonego poziomu transaminazy ALT i AST we krwi pełnej.
- Test diagnostyczny do oceny stanu fizjologicznego wątroby.

Sposób użycia

- Umieścić zawartość pudełka na czystej, suchej i płaskiej powierzchni, np. na stole.
- Dokładnie umyć ręce mydłem, opłucz pod bieżącą czystą wodą i osusz.
- Rozewnij aluminiową torebkę wzdłuż krawędzi, a następnie wyjmij płytkę testową oraz plastikową pipetę. Połóż je na płaskiej powierzchni w zasięgu ręki (wyrzucił saszetkę z pochłaniaczem wilgoci).
- Przygotuj nakłuwacz: przekręć szarą nakrętkę, aż poczujesz, że oddziela się od nakłuwacza (nie ciągnij); kontynuuj przekręcanie (2-3 obroty), zdejmij i wyrzucić nakrętkę (nie dotykaj przycisku uwalniającego).
- Zdezynfekuj opuszek wybranego palca dłoni i pomasuj 10-15 sekund w kierunku opuszka palca, aby zwiększyć jego ukrwienie.

- Dociśnij mocno nakłuwacz do bocznej strony zdezynfekowanego opuszka palca i naciśnij przycisk wysuwający lancet (końcówka nakłuwacza schowa się automatycznie zapewniając bezpieczeństwo po jego użyciu).
- Delikatnie masuj nakłuty opuszek palca, aby uzyskać krople krwi.
- Nie uciskając pipety, zbliż jej końcówkę do kropli krwi (krew migruje przez kapilarę, aż do linii wyznaczonej na pipecie); za pomocą masażu możesz uzyskać kolejną kroplę krwi, jeżeli linia na pipecie nie została osiągnięta.
- W miarę możliwości należy unikać wciągania do pipety pęcherzyków powietrza.
- Przenieś pobraną krew do dołka próbkowego płytki testowej poprzez ściśnięcie końcówki pipety.
- Poczekaj 30-40 sekund, aż cała krew znajdzie się w dołku próbkowym.
- Odkręć niebieską nakrętkę i dodaj 4 krople diluentu do dołka próbkowego (w przerwach 2-3 sekund pomiędzy każdą kroplą, trzymając diluent pionowo).
- Odczytaj wynik testu po upływie 10 minut (nie interpretuj wyniku testu po upływie 15 minut).

Ważne wskazówki

- Test jednorazowego użytku.
- Wyrób medyczny do samokontroli – przed wykonaniem należy zapoznać się z instrukcją użytkowania.
- Wynik testu jest wiarygodny tylko wówczas, gdy instrukcja jest ściśle przestrzegana.
- Test jest przeznaczony wyłącznie do diagnostyki in vitro. Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Nie połykać.
- Przechowywać w temperaturze od 4°C do 30°C, w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Producent

VEDA.LAB
Rue de l'Expansion
61000 Cerise, Francja