

Test na obecność Helicobacter pylori APTEO



Cena: 61,52 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	test
Producent	SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Diagnostyczne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Test APTEO na obecność *Helicobacter pylori* to szybki test immunochromatograficzny, który umożliwia jakościowe wykrywanie przeciwciał przeciwko bakterii *Helicobacter pylori* (Hp) w ludzkiej krwi. Stanowi pomocne narzędzie diagnostyczne przy wykrywaniu zakażenia tym drobnoustrojem.

Wskazania

Test ma za zadanie wykryć obecność przeciwciał przeciwko H. pylori we krwi, surowicy lub osoczu. Antygen rekombinowany *Helicobacter pylori* jest unieruchomiony w obszarze testowym. Krew, surowica lub osocze znajdujące się w próbce analitycznej reagują z cząsteczkami antygenów *Helicobacter pylori*.

Działanie

Test na obecność *Helicobacter pylori* APTEO jest jakościowym immunochromatograficznym testem, którego paski membran mają za zadanie wykryć obecność przeciwciał przeciwko *Helicobacter pylori* we krwi.

Antygen rekombinowany *Helicobacter pylori* jest unieruchomiony w obszarze testowym. Krew znajdująca się w próbce analitycznej reaguje z cząsteczkami antygenów *Helicobacter pylori*. Mieszanina ta przemieszcza się chromatograficznie wzdłuż paska testowego i współdziała z unieruchomionym antygenem *Helicobacter pylori*. Jeśli próbka zawiera przeciwciała *Helicobacter pylori*, w obszarze linii testu pojawi się kolorowa linia wskazująca na wynik pozytywny. Jeśli próbka nie zawiera przeciwciał *Helicobacter pylori*, kolorowa linia w tym obszarze nie pojawi się, co będzie oznaczać wynik negatywny. W każdym przypadku, kiedy nastąpi wysycenie membrany dzięki odpowiedniej ilości próbki, pojawi się kolorowa linia w obszarze kontrolnym.

Sposób użycia

- Test należy wykonać w pomieszczeniu, w którym temperatura utrzymuje się w granicach 15-30°C.
- Otworzyć saszetkę z testem tuż przed przeprowadzeniem badania.
- Umieścić kasetkę testową na czystej i równej powierzchni.
- W celu pobrania próbki krwi do badań należy nakłuć palec lancetem, aby pozyskać 1 kroplę krwi. Następnie:



– przenieść próbkę krwi na kasetkę testową (obszar na próbkę (S) w kasetce testowej) i dodać 1 krople (około 40 µl) roztworu testującego

lub

– trzymać pipetkę z próbką krwi pionowo nad obszarem na próbkę w kasetce testowej (S), przenieść ją na ten obszar i dodać 1 krople (około 40 µl) roztworu testującego.

- Poczekać na pojawienie się kolorowych linii. Wynik testu należy odczytywać dokładnie po 15 minutach.

Ostrzeżenia

- Nie do użytku wewnętrznego.
- Przed użyciem zapoznać się z instrukcją używania.
- Produkt należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem.

Producent

HANGZHOU CLONGENE BI