

# Test owulacyjny LH paskowy APTEO CARE, 5 testów

Cena: 16,51 zł



## Opis słownikowy

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Dla kogo        | Dla kobiet                 |
| Opakowanie      | 5 sztuk                    |
| Postać          | test                       |
| Producent       | SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O. |
| Przeznaczenie   | Diagnostyczne              |
| Rodzaj produktu | Wyrób medyczny             |
| Wiek            | Dla dorosłych              |

## Opis produktu

### Opis

Jednorazowy test o wysokiej czułości i skuteczności, przeznaczony do wykrywania poziomu hormonu LH w moczu, pomagający monitorować cykl hormonalny.

### Działanie

Test owulacyjny jest jakościowym testem immunologicznym typu paskowego do oznaczenia ludzkiego hormonu luteinizującego (hLH) w moczu. Membrana testu została pokryta kozim przeciwciałem (anty-hLH) na obszarze linii testowej i kozim oraz anti-mysim przeciwciałem na obszarze linii kontrolnej.

Podczas testu próbkę moczu poddaje się reakcji z kolorowym koniugatem. Następnie próbka przesuwana się w górę na chromatograficznej membranie poprzez działanie kapilarne. Gdy w próbce jest obecny hormon hLH, utworzy się barwne pasmo. W obszarze kontrolnym zawsze pojawi się jasna linia. Służy ona jako odniesienie do intensywności koloru przy stężeniu LH wynoszącym około 25 mIU/ml. Jeśli kolor linii testowej jest intensywniejszy niż kolor linii kontrolnej, wynik testu jest pozytywny – wskazuje to na prawdopodobny wzrost poziomu LH.

### Sposób użycia

- Test należy wykonywać w pomieszczeniu, w którym temperatura utrzymuje się w granicach 18-30°C.
- Przed użyciem należy przygotować stoper.
- Zebrać próbkę moczu do pojemnika testowego dołączonego do opakowania. Nie jest preferowana próbka pierwszego, porannego moczu.
- Wyjąć test LH z saszetki foliowej, rozrywając ją w miejscu nacięcia i chwytając za jego górną część. Środek pochłaniający wilgoć, znajdujący się w środku saszetki, wyrzucić wraz z saszetką.
- Zanurzyć pasek testowy w pobranym moczu do linii paska, tak jak pokazuje strzałka. Nie zanurzać powyżej linii MAX (maksimum).
- Po 5 sekundach wyjąć pasek testowy z badanego moczu i umieścić go na płaskiej, czystej, suchej niechłonnej powierzchni.
- Obserwować przemieszczanie się badanej próbki moczu przez strefę testową i kontrolną paska testowego. Odczekać, aż pojawią się barwne linie. 8.



Wynik testu należy odczytać po 5 minutach od momentu zanurzenia paska testowego w moczu. Jeśli nie pojawi się żadna barwna linia, odczekać jeszcze 1 minutę. Jeżeli wynik jest pozytywny, to może być już zaobserwowany w czasie 40 sekund.

- Jednakże w celu potwierdzenia wyniku negatywnego, należy odczekać pełny czas reakcji (10 minut).
- Nie brać pod uwagę wyniku otrzymanego po czasie dłuższym niż 10 minut, bowiem może być on błędny.
- Po jednokrotnym użyciu test należy wyrzucić.

#### Ostrzeżenia

- Wyrób do samokontroli,
- Nie do użytku wewnętrznego,
- Przed użyciem zapoznać się z instrukcją używania.

#### Producent

SYNOPTIS PHARMA