

Test Owulacyjny Ultraczuły, płytkowy, 5 sztuk

Cena: 15,14 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet
Opakowanie	5 sztuk
Postać	test
Producent	DIATHER SP. Z O.O. SP.K.
Przeznaczenie	Diagnostyczne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Ultraczuły Test Owulacyjny to wyrób medyczny wykrywający hormon luteinizujący (LH) w moczu, co pozwala na określenie dni płodnych.

Działanie

Test wykrywa znajdujący się w moczu kobiety hormon LH, którego stężenie wzrasta około 24-36 godzin przed wystąpieniem owulacji.

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony jest dla kobiet świadomie planujących ciążę, które chcą oznaczyć swoje dni płodne.

Sposób użycia

1. Pobierz próbkę moczu do suchego, czystego pojemnika.
2. Za pomocą pipety nanieś 3 krople próbki na okienko płytki oznaczone symbolem S.
3. Odczekaj 5 minut i sprawdź wynik.

Ostrzeżenia

- Nie należy spożywać dużej ilości płynów na minimum 2 godziny przed wykonaniem testu, gdyż może to spowodować nadmierne rozcieńczenie moczu, a uzyskany wynik może być fałszywie ujemny.
- Nie należy odczytywać wyniku po upływie więcej niż 5 minut - wynik może stać się fałszywie dodatni.
- Nie należy używać do badania pierwszego moczu porannego, gdyż jest on zagęszczony i może dawać fałszywie dodatni wynik.

Uwagi

- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Stosowanie doustnej antykoncepcji hormonalnej, ciąża oraz karmienie piersią mogą mieć wpływ na wynik testu.

Producent



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

HANGZHOU AllTest Biotech Co. Ltd
550 Yinhai Street
Hangzhou, China