

Test paskowy Diagomat Strip, 50 pasków



Cena: 34,93 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	50 pasków
Postać	Test paskowy
Producent	DIAGNOSIS S.A.
Przeznaczenie	Diagnostyczne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Diagomat Strip to zestaw 50 pasków testowych, stanowiących wyrób medyczny do precyzyjnego pomiaru stężenia glukozy we krwi. Przeznaczone do stosowania z glukometrem marki Diagomat, umożliwiają kontrolę poziomu cukru w warunkach domowych i klinicznych.

Wskazania

Wyrób medyczny Paski testowe Diagomat Strip przeznaczone do ilościowego oznaczania glukozy (cukru) we krwi pobranej drogą nakłucia opuszka palca, dłoni lub przedramienia w warunkach domowych oraz w placówkach medycznych

Skład

Oksydzyna glukozowa - 1,4% w/w, żelazocyjanek potasu 2,6%, składniki obojętne chemicznie-96% w/w.

Ostrzeżenia

- Niskie i wysokie wartości stężenia glukozy mogą wskazywać na istnienie potencjalnie zagrażającej zdrowiu sytuacji.
- Silne odwodnienie i nadmierna utrata płynów może prowadzić do zaniżonych wyników pomiarów.
- Wszystkie odpady zanieczyszczone krwią są uważane za materiały potencjalnie zakaźne i podlegają szczególnym zasadom usuwania.
- Nie należy stosować po upływie terminu ważności.
- Chronić przed wilgocią.
- Nie używać przy uszkodzonym opakowaniu.
- Chronić przed promieniami słońca.
- Przechowywać w temperaturze 4-30°C. Nie przechowywać w lodówce, nie zamrażać.

Uwagi

- Tylko do użytku zewnętrznego.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

- Wyrób do samokontroli. Do jednorazowego użytku.
- Bezpośrednio po wyjęciu paska z pojemnika należy go szczelnie zamknąć.
- Nie zginać, nie przecinać, ani w inny sposób nie uszkadzać pasków testowych.
- Pasek testowy należy wykorzystać natychmiast po wyjęciu z opakowania (pojemnika).

Producent

DIAGNOSIS S.A.
Gen. W. Andersa 38A
15-113 Białystok