

Test SGTi-flex COVID-19 Ag, test antygenowy, kasetkowy, 1 sztuka

Cena: 36,64 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	test
Producent	DIATHER SP. Z O.O. SP.K.
Przeznaczenie	Diagnostyczne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

SGTi-flex COVID-19 Ag to test antygenowy w formie kasetki, przeznaczony do samodzielnego i szybkiego wykrywania obecności antygeny wirusa SARS-CoV-2 w próbce pobranej z nosa. Dzięki prostemu sposobowi użycia pozwala na uzyskanie wyników w warunkach domowych, bez konieczności wizyty w placówce medycznej.

Wskazania

Wskazaniem to wykonania testu jest: gorączka, zmęczenie, bóle mięśni, suchy kaszel, a także utrata węchu i smaku.

Działanie

Test umożliwia wykrycie antygenów wirusa SARS-CoV-2 znajdujących się w próbce poprzez ich wychwytywanie przez swoiste przeciwciała znajdujące się na membranie testu.

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony jest do samokontroli.

Sposób użycia

1. Za pomocą jednorazowej wymazówki pobierz próbkę wymazu z nosa.
2. Umieść wymazówkę z pobraną próbką w buforze ekstrakcyjnym.
3. Nałóż końcówkę z zakraplaczem na probówkę z buforem, następnie nanieś 3 krople na okienko testowe na kasetce.
4. Po upływie 15 minut odczytaj wynik.

Uwagi

- Wymaz należy pobierać z przedniej części nosa.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

- Wynik należy odczytać w czasie 15-30 minut od wykonania testu, nie wcześniej i nie później.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Producent

DIATHER Sp. z o.o. Sp. k
Wały Piastowskie 1
80-854 Gdańsk