

Thealoz Duo Gel, żel płynny do oczu, 0,4 g x 30 sztuk



Cena: 70,89 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	30 minims. po 0,4 ml
Postać	żel do oczu
Producent	THEA POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Łagodzące, Nawilżające, Ośnianiające, Regenerujące
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Thealoz Duo Gel to medyczny preparat w postaci płynnego żelu, przeznaczony do aplikacji bezpośrednio na powierzchnię oka. Produkt działa nawilżająco i wspomaga regenerację. Kluczowe składniki odpowiadają za nawilżenie i komfort – trehaloza wspiera procesy regeneracyjne, natomiast hialuronian i karbomer przynoszą szybką ulgę zmęczonym i podrażnionym oczom. Dzięki żelowej formule preparat utrzymuje się na oku dłużej, zapewniając ochronę i długotrwałe uczucie komfortu.

Dawkowanie

Dorośli: 1 kroplę preparatu należy wkraplać do każdego oka od 1 do 4 razy dziennie.

Skład

Trehaloza, hialuronian sodu, karbomer, sorbitol, wodorotlenek sodu, woda do wstrzykiwań.

Stosowanie

- Przed zastosowaniem wyrobu należy dokładnie umyć ręce.
- Oderwać jeden z pojemników umieszczonych na taśmie.
- Obrócić oderwany pojemnik do góry nogami i postukać w niego.
- Ruchem obrotowym, trzymając za końcówkę pojemnika, otworzyć go.
- Wprowadzić do worków spojówkowych po jednej kropli preparatu.
- Wyrzucić jednorazowe opakowanie po użyciu, nawet jeśli znajdują się w nim resztki wyrobu.

Przeznaczenie

Produkt polecany dla osób, które:

- cierpią na objawy wynikające z suchości oczu,
- potrzebują pomocy przy regeneracji po przebytym zabiegu lub urazie okulistycznym.

Ostrzeżenia

- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej, chroniąc od światła i wilgoci, w sposób niedostępny dla dzieci.
- Nie wstrzykiwać, nie połykać.
- Nie stosować jeśli pojemnik jest uszkodzony.

Uwagi

Produkt nie zawiera konserwantów ani fosforanów.

Producent

Laboratoires THEA.
12 Rue Louis Bleriot
63017 Clermont-Ferrand Cedex 2, Francja

Galeria

