

ThermaCare, kompresy rozgrzewające na plecy i biodra, 2 sztuki

Cena: 43,56 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	THERMACARE
Opakowanie	2 sztuki
Postać	Plastry
Producent	ANGELINI PHARMA POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Łagodzące (kojące), Rozgrzewające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny, Akcesoria
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

ThermaCare kompresy rozgrzewające na plecy i biodra (2 sztuki) skutecznie łagodzą bóle mięśni i stawów spowodowane przeciążeniem, napięciem mięśniowym, sztywnością oraz stanami zapalnymi. Produkt jest przeznaczony do stosowania na dolną część pleców lub okolice stawów biodrowych. Kompresy są wyrobem medycznym dedykowanym dla osób dorosłych i działają poprzez rozgrzewanie obszaru objętego dolegliwościami.

Składniki

Granulki żelaza, węgiel aktywny, sól i woda.

Sposób użycia

- Przed użyciem (bezpośrednio) rozerwij saszetkę z kompresem.
- Oderwij papier, żeby odsłonić stronę z klejem.
- Przyklej kompres na bolące okolice bioder lub dolnych partii pleców.
- Zachowaj ostrożność, przyklejając plaster, aby komórki ciepłe na siebie na nachodziły.
- Nie używaj kompresu dłużej niż przez 8 godzin w ciągu doby (24 godzin).
- Nie używaj kompresu ponownie.

Właściwości

- Na plecy i biodra,
- Samozogrzewający,
- Z opatentowanymi komórkami ciepłymi,
- Łagodzący bóle mięśni i stawów do 16 godzin (8 z kompresem + 8 po jego zdjęciu),

- Pomagający poprawić mobilność,
- Regulowany obwód – maksymalnie do 120 cm,
- Opakowanie: 2 sztuki.

Ostrzeżenia

- To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Nie stosuj kompresu w czasie snu, jeżeli masz 55 lat lub więcej. Wraz z wiekiem rośnie ryzyko poparzeń skóry.
- Wyrób medyczny może powodować pęcherze skórne i (lub) poparzenia. W czasie stosowania często kontroluj stan skóry. Jeżeli stwierdzić pojawienie się podrażnienia lub oparzenia natychmiast usuń kompres.
- Skonsultuj się z lekarzem przed użyciem kompresu jeżeli chorujesz na cukrzycę, reumatoidalne zapalenie stawów, masz problemy z krążeniem, cierpisz na chorobę serca lub jesteś w ciąży.
- Nie używaj kompresu ThermaCare® jeżeli stwierdzisz wyciek zawartości komórek cieplnych, uszkodzenie lub rozdarcie kompresu.
- Nie stosuj produktu jednocześnie z lekami stosowanymi miejscowo (na skórę).
- Nie stosuj wyrobu medycznego na zmienioną chorobowo, podrażnioną albo uszkodzoną skórę.
- Nie stosuj kompresu w miejscu obrzęków lub siniaków, które wystąpiły w ciągu ostatnich 48 godzin.
- Nie stosuj produkty na obszary ciała z zaburzonym czuciem temperatury.
- Nie stosuj kompresu z innymi produktami emitującymi ciepło (plastrami rozgrzewającymi, poduszkami grzewczymi itp.).
- Zaprześć stosowania kompresu i skonsultuj się z lekarzem w przypadku pojawienia się wysypki, obrzęku lub innych zmian na skórze, które utrzymują się podczas stosowania kompresu.
- Każda komórka cieplna zawiera około 2 g żelaza. Natychmiast zgłoś się do lekarza w przypadku połknięcia.
- W przypadku kontaktu zawartości komórki cieplnej ze skórą bądź oczami usuń kompres, przemyj dotknięty obszar wodą i niezwłocznie zgłoś się do lekarza.
- Nie podgrzewaj kompresu w kuchenie mikrofalowej ani nie próbuj go podgrzać powtórnie. Kompres może się zapalić.

Ważne wskazówki

- ThermaCare kompresy samorozgrzewające potrzebują do 30 minut, aby osiągnąć temperaturę terapeutyczną.
- Przechowuj produkt poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Nie wywieraj dodatkowego nacisku na produkt np. nie noś go pod obcisłą odzieżą.
- Przestań używać plastra, gdy jest zbyt gorący lub załóż go na warstwę ubrania, żeby nie przylegał bezpośrednio do skóry.
- Usuń kompres przed poddaniem się badaniu rezonansem magnetycznym, by uniknąć zwiększonego ryzyka poparzeń.

Producent

ANGELINI PHARMA CIESKA REPUBLIKA S.R.O.

Galeria

