

# ThermaCare, kompresy rozgrzewające na szyję, ramiona, nadgarstki, 2 sztuki

Cena: 38,48 zł



## Opis słownikowy

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Dla kogo        | Dla kobiet, Dla mężczyzn          |
| Marka           | THERMACARE                        |
| Opakowanie      | 2 sztuki                          |
| Postać          | Plastry                           |
| Producent       | ANGELINI PHARMA POLSKA SP. Z O.O. |
| Przeznaczenie   | Łagodzące (kojące), Rozgrzewające |
| Rodzaj produktu | Wyrób medyczny, Akcesoria         |
| Wiek            | Dla dorosłych, Dla seniorów       |

## Opis produktu

### Opis

**ThermaCare** kompresy rozgrzewające na szyję, ramiona i nadgarstki (2 sztuki) są zaprojektowane, aby łagodzić bóle mięśni i stawów związane z nadmiernym wysiłkiem, napięciem, przeciążeniem, nadwyrężeniem, skręceniem oraz stanami zapalnymi. Odpowiednie zarówno do bólu przewlekłego, jak i sporadycznego, te kompresy są wyrobem medycznym przeznaczonym dla dorosłych. Kompresy ThermaCare charakteryzują się ergonomicznym kształtem, który elastycznie dopasowuje się do ruchów ciała i precyzyjnie przylega do skóry na szyi, barkach, karku, ramionach i nadgarstkach. Wyposażone w 10 opatentowanych komórek ciepłych, są proste w użyciu – wystarczy usunąć folię ochronną i przykleić kompres do bolącego miejsca za pomocą dwóch taśm samoprzylepnych.

### Składniki

Kompres zawiera komórki ciepłe składające się wyłącznie z substancji pochodzenia naturalnego, tj.: sproszkowane żelazo, węgiel aktywny, sól i woda. Nie zawiera substancji leczniczych.

### Zastosowanie

Kompresy rozgrzewające ThermaCare® stosuje się w celu łagodzenia bólu:

- szyjnego odcinka kręgosłupa,
- barków,
- ramion,
- nadgarstków.

związanego z:

- nadmiernym wysiłkiem,
- przeciążeniem,

- skręceniem,
- zapaleniem stawów.

### Sposób użycia

- Rozewij saszetkę bezpośrednio przed użyciem i wyjmij kompres.
- Usuń folię ochronną i przyklej kompres na bolące okolice szyi lub ramion lub nadgarstka. Uważaj, by nie dotknąć powierzchni przylepnej, aby nie osłabić działania klejącego. Przyklejając plaster na nadgarstek, zachowaj ostrożność, aby komórki ciepłe na siebie nie nachodziły.
- Aby skutecznie złagodzić ból szyi i ramion, noś ThermaCare w sposób ciągły (bez zdejmowania) maksymalnie przez 8 godzin. Po tym czasie temperatura ogrzewania stopniowo zmniejsza się i nie ma potrzeby stosowania produktu dłużej. Wydłużanie czasu stosowania może zwiększyć ryzyko podrażnienia lub poparzenia skóry.
- Nie używaj kompresu ponownie – jest to produkt jednorazowy.
- Kompresy rozgrzewające ThermaCare stosuj maksymalnie przez 7 kolejnych dni. Jeśli po tym czasie ból nie ulegnie zmianie lub nasili się, skonsultuj się z lekarzem w celu ustalenia przyczyny.

### Właściwości

- Do stosowania w przypadku nieswoistego bólu mięśni i stawów w okolicy szyi i ramion;
- Ergonomiczny kształt dopasowany do kształtu szyi, ramion, karku i nadgarstka;
- Samozagrzewające – z opatentowanymi komórkami cieplnymi osiągającymi temperaturę ok. 40°C w ciągu 30 minut;
- Elastyczne – dopasowują się do ruchów;
- Pomagają złagodzić bóle mięśni i stawów, i poprawić ich ruchomość;
- Efekt grzania do 8 godzin;
- Powierzchnia ogrzewania: 29 cm x 6,5 cm;
- 2 obszary przylepne.

### Ostrzeżenia

- Wyrób może powodować pęcherze skórne i (lub) poparzenia. W czasie stosowania często kontroluj stan skóry. Jeżeli stwierdzić pojawienie się podrażnienia lub oparzenia natychmiast usuń kompres.
- Zaprzeżaj stosowania kompresu i skonsultuj się z lekarzem w przypadku pojawienia się wysypki, obrzęku lub innych zmian na skórze, które utrzymują się podczas stosowania kompresu.
- Jeżeli chorujesz na cukrzycę, reumatoidalne zapalenie stawów, masz problemy z krążeniem, cierpisz na chorobę serca lub jesteś w ciąży, stosowanie kompresu skonsultuj się z lekarzem.
- Jeżeli masz 55 lat lub więcej nie stosuj kompresu w czasie snu. Wraz z wiekiem rośnie ryzyko poparzeń skóry.
- Nie podgrzewaj kompresu w kuchenke mikrofalowej ani nie próbuj go podgrzać powtórnie. Kompres może się zapalić.

### Ważne wskazówki

- Przechowuj produkt poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Nie wywieraj dodatkowego nacisku na produkt np. nie noś go pod obcisłą odzieżą.
- Przestań używać plastra, gdy jest zbyt gorący lub załóż go na warstwę ubrania, żeby nie przylegał bezpośrednio do skóry.
- Usuń kompres przed poddaniem się badaniu rezonansem magnetycznym, by uniknąć zwiększonego ryzyka poparzeń.
- Każda komórka ciepła zawiera około 2 g żelaza. Natychmiast zgłoś się do lekarza w przypadku połknięcia.
- W przypadku kontaktu zawartości komórki ciepłej ze skórą bądź oczami usuń kompres, przemyj dotknięty obszar wodą i niezwłocznie zgłoś się do lekarza.

### Producent

ANGELINI PHARMA CIESKA REPUBLIKA S.R.O.

## Galeria

