

Undofen Pro Pen Terapia Kwasowa TCA kurzajki i brodawki, żel, 1 aplikator



Cena: 69,14 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	350 mcl
Postać	Żel
Producent	PERRIGO POLAND SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Brodawki, Kurzajki
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 4 lat

Opis produktu

Opis

Undofen Pro Pen Terapia Kwasowa TCA to wyrób medyczny w formie żelu, który służy do usuwania kurzajek i brodawek. Jest przeznaczony dla dorosłych oraz dzieci powyżej 4. roku życia. Produkt charakteryzuje się prostą i szybką aplikacją dzięki innowacyjnemu aplikatorowi. Skutecznie i bezboleśnie eliminuje kurzajki oraz brodawki.

Wskazania

Wyrób medyczny Undofen Pro Pen Terapia Kwasowa TCA przeznaczony jest do samodzielnego usuwania brodawek i kurzajek przy pomocy silnie stężonego żelu.

Skład

Kwas trójchlorooctowy (TCA), woda.

Sposób użycia

- Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać całą instrukcję użytkowania wyrobu medycznego.
- Aby zapobiec podrażnieniom i przebarwieniom, leczoną skórę należy chronić przed słońcem przez 30 dni po zabiegu.
- Przed pierwszym użyciem i zdjęciem nakrętki należy wykonać kilka pełnych obrotów, aby żel przedostał się do końcówki aplikatora.
- Stuknij aplikatorem 3 razy w twardą powierzchnię, aby żel spłynął do końcówki aplikatora.
- Zrównaj niebieskie zgrubienie (na nakrętce) i białe (na aplikatorze), a następnie zdejmij nakrętkę.
- Połóż końcówkę aplikatora na brodawkę/kurzajkę, naciśnij niebieski przycisk i trzymaj przez 10 sekund.
- Po aplikacji, nałóż nakrętkę i przekręć tak, żeby niebieski i biały punkt nie były na tej samej wysokości.
- Aplikację należy powtarzać raz w tygodniu, przez maksymalnie 6 tygodni.



Ostrzeżenia

- Kwas trójchloorooctowy (TCA) ma silne działanie żrące. Należy zachować szczególną ostrożność podczas aplikacji.
- Nie polecane dla osób chorych na cukrzycę i z problemami krążenia.
- Stosować tylko do usuwania brodawek/kurzajek. Nie używać w razie wątpliwości czy jest to brodawka/kurzajka.
- Używać produkt tylko przez jedną osobę.
- Nie stosować na obszary skóry inne niż ręce i stopy.
- Nie stosować na rany i podrażnioną skórę.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
- Zużyć w ciągu 6 tygodni od pierwszego otwarcia opakowania.

Uwagi

Nie stosować produktu w przypadkach, gdy: opakowanie lub produkt jest uszkodzony, końcówka urządzenia nie pęka podczas przekręcania nakrętki po pierwszym użyciu lub nie słychać dźwięku po kliknięciu niebieskiego przycisku.

Producent

OMEGA PHARMA
Drážní 253/7
Brno, Czechy