

# UniGel Wyrób medyczny hydrofilowy żel 30 g

Cena: 127,83 zł



## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	UNIGEL
Opakowanie	30 g
Postać	Żel
Producent	APOTEX NEDERLAND B.V.
Przeznaczenie	Regenerujące (odbudowujące), Ułatwiające gojenie
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

## Opis produktu

### Opis

UniGel to produkt medyczny w postaci hydrofilowego żelu przeznaczonego do leczenia powierzchniowych ran skóry. Preparat jest zalecany w przypadku drobnych i trudno gojących się ran oraz oparzeń.

### Składniki

UniGel Apotex to hydrofilowy żel metakrylowy będący usieciowanym kopolimerem 2-hydroksyetylometakrylanu, który posiada polimerowo wiązane i sterycznie osłaniane grupy aminowe (HEMA-HAS).

### Zastosowanie

Wspomaganie leczenia:

- drobnych skaleczeń i otarć,
- trudno gojących się rany,
- oparzeń,
- owrzodzeń spowodowanych niewydolnością krążenia żylnego lub tętniczego,
- odleżyn.

### Sposób użycia

- Ranę oczyścić z zabrudzeń, np. pyłu.
- Przy użyciu nakrętki przebić przebić górną część tubki.
- Niewielką ilość preparatu (1 mm) należy nałożyć na powierzchnię rany, w taki sposób by w całości ją pokryła.
- Przykryć ranę sterylnym gazikiem i umocować go za pomocą bandaża lub plastra. Drobne rany po zastosowaniu żelu można zabezpieczyć plastrami z opatrunkiem.
- Po aplikacji żel pęcznieje. Unikalna struktura żelu zapobiega przywieraniu do rany, co umożliwia jego łatwe, bezbolesne



usunięcie poprzez delikatne starcie lub zmycie.

#### Przeciwwskazania

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.
- Nie stosować po upływie terminu ważności wyrobu medycznego.
- Nie stosować jeśli opakowanie jest uszkodzone.
- Nie stosować wewnętrznie. Tylko do użytku zewnętrznego.

#### Ostrzeżenia

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- W przypadku osób o podwyższonej wrażliwości lub po zastosowaniu w miejscach wrażliwych (np. okolica oczu), może wystąpić lekkie podrażnienie skóry (np. swędzenie lub zaczerwienienie). W takiej sytuacji należy przerwać stosowanie żelu i skonsultować się z lekarzem.
- Ponieważ brak jest badań klinicznych dotyczących stosowania u dzieci UniGel można stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem.
- Stosować nie dłużej niż 30 dni. Stosowanie żelu powyżej 30 dni należy skonsultować z lekarzem.

#### Producent

VH Pharma a.s.  
Jakubowska 647/2  
11000 Praha 1, Republika Czeska